


Model AC327

Niania elektroniczna Video z czujnikiem ruchu,
4.3 - calowy ekran

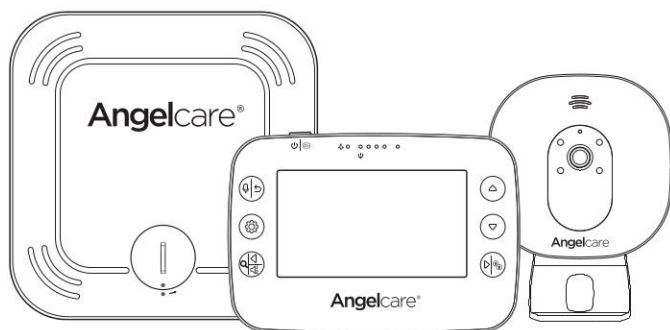

⚠ OSTRZEŻENIE

Instrukcję obsługi należy zachować do użytku w przyszłości. Przed złożeniem i rozpoczęciem użytkowania produktu, należy dokładnie zapoznać się z ostrzeżeniami i instrukcją dotyczącą bezpieczeństwa. Nieprzestrzeganie ostrzeżeń i instrukcji może skutkować poważnymi obrażeniami, zgonem lub uszkodzeniem produktu.

WAŻNE - PRZEZNACZENIE

Ten produkt NIE jest przeznaczony i NIE powinien być używany do zapobiegania wystąpieniu nagłej śmierci łóżeczkowej niemowląt (SIDS).

Ten produkt NIE jest przeznaczony do diagnozowania, leczenia, ani łagodzenia schorzeń lub chorób, ani też do zapobiegania im.

Ten produkt służy do monitorowania ruchów zdrowych dzieci i nie zastępuje opieki rodziców.

Ta niania elektroniczna jest zgodna ze wszystkimi stosownymi normami dotyczącymi pól elektromagnetycznych i jest bezpieczna w użytkowaniu, pod warunkiem obsługi zgodnie z instrukcją.

! OSTRZEŻENIA

1. Z powodu poważnego zagrożenia uduszeniem dla niemowląt i małych dzieci, rodzice i opiekunowie powinni zwrócić uwagę na następujące ostrzeżenia:



! OSTRZEŻENIE - Ryzyko Uduszenia - Zdarzają się przypadki UDUSZENIA SIĘ dzieci przewodami.

- **TRZYMAĆ** nadajnik i przewody zasilacza **POZA** zasięgiem dzieci, w odległości większej niż 1 metr.
- **NIGDY** nie podłączać zasilaczy sieciowych do przedłużaczy. Używać **WYŁĄCZNIE** dołączonych zasilaczy.
- **Ten produkt NIE jest zabawką. NIGDY nie pozwalac dzieciom, aby się nim bawiły.**

2.

! OSTRZEŻENIE - PŁYTKA SENSORYCZNA - BRAK ALARMU

- Źródła wibracji i ruchu, inne niż dziecko, mogą być wykrywane przez płytkę sensoryczną i zakłócać prawidłowe działanie monitora Angelcare.
- Alarm nie zostanie wyemitowany, jeśli monitor wykryje ruch inny niż ruch dziecka.
- Ustawienie wysokiej czułości może wyłapywać inne źródła wibracji i ruchu - należy zapoznać się z instrukcjami dotyczącymi ustawień czułości, aby je odpowiednio dostosować.
- Inne aktywne i starsze dzieci przebywające w tym samym pomieszczeniu mogą być wykrywane i alarm nie zostanie wyemitowany.
- Upewnij się, że otoczenie dziecka jest **WOLNE** od wszelkich innych wibracji i ruchów podczas używania płytki sensorycznej - patrz ostrzeżenia 3 do 11 poniżej.

3. NIE używać karuzel nad łóżeczko i innych akcesoriów do łóżeczka, które mogą wytwarzać ruchy lub wibracje.

4. Wentylatory (w tym sufitowe), pralki, deski podłogowe, centralne ogrzewanie lub głośna muzyka są rodzajami ruchu oraz drgań i mogą powodować zakłócenia i być wykrywane przez płytkę sensoryczną.

5. Jeżeli podłączony jest dodatkowy nadajnik, to musi być on umieszczony co najmniej 2 metry od nadajnika 1 i płytki sensorycznej, ponieważ może zakłócać ich prawidłowe działanie.

6. NIE używać z łóżeczkami dostawnymi, dotykającymi łóżka rodziców/opiekunów, ponieważ płytka sesoryczna będzie wykrywać ich ruchy.

7. NIE umieszczać łóżeczka przy ścianie lub listwie przypodłogowej, bo mogą być wykrywane wibracje.

8. Po wyjściu dziecka z łóżeczka, w przypadku niektórych materacy może ciągle być wykrywany ruch materaca, gdyż powraca on do pierwotnego kształtu i alarm może się nie uruchomić.

9. Upewnij się, że łóżeczko jest stabilne, aby wyeliminować wszelkie ruchy.

10. Łóżeczko nie może być umieszczone w zasięgu

ręki od innego łóżka lub łóżeczka dziecięcego.

11. NIE używać innych urządzeń bezprzewodowych w tym samym pomieszczeniu, w którym jest monitor (włącznie z telefonami komórkowymi i mikrofalówkami). Mogą one zakłócać sygnał i poprawne działanie urządzenia.

12. **Płytką sensoryczna jest wykonana z plastiku i nie przepuszcza powietrza.** Z tego powodu pod materacem, w miejscu, w którym znajduje się płytka, może powstawać pleśń. Sugerujemy regularne obracanie i wietrzenie/ suszenie materaca, aby zapobiec powstawaniu pleśni. **UNIKAĆ KONTAKTU Z WILGOCIĄ.** Czyszczenie - wycierać suchą, niepozostawiającą włókien ściereczką.

13. **Płytką sensoryczna nie jest odpowiednia dla dzieci w wieku powyżej 24 miesięcy.**

14. **Ten produkt nie zastępuje nadzoru odpowiedzialnej osoby dorosłej.**

• Ten produkt został zaprojektowany w celu zapewnienia pomocy w monitorowaniu Twojego dziecka. Podczas używania niani elektronicznej, nadal należy zapewnić nadzór niezbędny dla ciągłego bezpieczeństwa dziecka.

· Urządzenia używać WYŁĄCZNIE zgodnie z jego przeznaczeniem, tak jak opisano to w tej instrukcji.

15. Płytką sensoryczna nie jest przeznaczona do sprawdzania czy dziecko znajduje się poza łóżeczkiem.

16. Po uruchomieniu się alarmu, ZAWSZE należy natychmiast sprawdzić co dzieje się z dzieckiem.

17. Trzymać przewody poza zasięgiem WSZYSTKICH dzieci.

18. Używać WYŁĄCZNIE dołączonych ładowarek i zasilaczy. Nie używać innych rodzajów, ponieważ może to uszkodzić urządzenie i akumulator (jeśli monitor go posiada).

19. Wymagany jest montaż przez osobę dorosłą. Podczas montażu trzymać małe części z dala od dzieci.

20. Należy postępować zgodnie z instrukcjami i przetestować monitor oraz jego funkcje, tak aby zapoznać się z nimi przed faktycznym użyciem. ZAWSZE należy upewnić się, że zarówno nadajnik jak i odbiornik działają prawidłowo i znajdują się w wzajemnym zasięgu – należy to sprawdzić okresowo i po zmianie lokalizacji nadajnika.

21. NIE dotykać styków złączy, zwłaszcza ostrymi lub metalowymi przedmiotami.

22. NIE używać niani elektronicznej w pobliżu wody. Zachować ostrożność, aby żadne przedmioty NIE spadły na urządzenie, ani żadne płyny nie wlały się do środka nadajnika, odbiornika lub płytki sensorycznej przez otwory w obudowie.



23. Trzymać monitor Z DALA od źródeł ciepła (takich jak piekarniki, grzejniki itp.). Ciepło może uszkodzić obudowę lub części elektroniczne.

24. Należy ZAWSZE kłaść nadajnik i odbiornik pionowo na płaskiej, twardej powierzchni, tak aby zapewnić odpowiednią WENTYLACJĘ. NIE ustawiać na sofach, poduszkach, łóżkach itp. co mogłoby blokować wentylację, lub w miejscach gdzie dźwięk byłby tłumiony, lub też zakłócony byłby normalny przepływ powietrza.

25. Niania elektroniczna może być używana tylko w temp. między 10°C a 40°C (50°F - 104°F), przy wilgotności względnej max 75%. W czasie dłuższych okresów używania temperatura nie może przekraczać 28°C (82,4°F).

OSTRZEŻENIA I INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA DOTYCZĄCE BATERII

⚠️ OSTRZEŻENIE

Nie pokać baterii, niebezpieczeństwo poparzenia chemicznego. Ten produkt zawiera baterię guzikową / w kształcie monety. Jeżeli bateria guzikowa zostanie połknięta, może to spowodować poważne oparzenia wewnętrzne w zaledwie 2 godziny i może to doprowadzić do śmierci. Nowe i użyte baterie trzymać z dala od dzieci. Jeśli komora baterii nie zamyka się bezpiecznie, zaprzestać używania produktu i trzymać go z dala od dzieci. Jeśli podejrzewasz, że bateria mogła zostać połknięta lub umieszczona w jakiegokolwiek części ciała, szukaj natychmiastowej pomocy lekarskiej.

⚠️ OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE BATERII

PRZECHOWYWAĆ W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI

Połknięcie może skutkować oparzeniami chemicznymi, perforacją tkanek miękkich i zgonem. W ciągu dwóch godzin od połknięcia może dojść do poważnych oparzeń. Należy natychmiast zasięgnąć porady lekarza.



⚠️ OSTRZEŻENIE

ZAWIADA BATERIĘ GUZIKOWĄ. ZAGROŻENIE W PRZYPADKU POŁKNIECIA – PATRZ PONIŻEJ BATERIE GUZIKOWE/W KSZTAŁCIE MONETY STANOWIĄ ZAGROŻENIE I MUSZĄ BYĆ ZAWSZE PRZECHOWYWANE W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI, NIEZALEŻNIE OD TEGO CZY BATERIA JEST NOWA CZY UŻYWANA. TE BATERIE MOGĄ SPOWODOWAĆ PÓWAŻNE LUB ŚMIERTELNE OBRAŻENIA W CIĄGU DWÓCH GODZIN LUB SZYBCIEJ, JEŚLI ZOSTANĄ POŁKNIĘTE LUB UMIESZCZONE W JAKIMKOLWIEK OTWORZE CIAŁA. W PRZYPADKU PODEJRZENIA POŁKNIECIA BATERII LUB UMIESZCZENIA ICH W JAKIMKOLWIEK OTWORZE CIAŁA, NALEŻY NATYCHMIAST ZASIĘGNĄĆ PORADY LEKARZA. JEŚLI NIĘ MOŻNA PRAWIDŁOWO ZAMKNAĆ KOMORY BATERII, ZAPRZESTAĆ UŻYWANIA PRODUKTU I PRZECHOWYWAĆ GO W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI.

26. Objawy połknięcia baterii i umieszczenia ich w otworach ciała są trudne do zdiagnozowania.

BRĄK OCZYWISTYCH OBJAWÓW

Niestety nie da się łatwo stwierdzić, czy bateria guzikowa lub w kształcie monety utknęła w przełyku (przewodzie pokarmowym) dziecka. Brak swoistych objawów związanych z tym zjawiskiem. Dziecko może:

- kaszleć, krztusić się lub bardzo się ślinić;
- zachowywać się jakby cierpiał na zaburzenia trawienia lub chorobę wirusową;
- mieć mdłości lub wymiotować;
- dotykać szyi lub brzucha;
- mieć ból brzucha, klatki piersiowej lub gardła;
- odczuwać zmęczenie lub zmęczenie;
- zachowywać się spokojniej lub chcieć się przytulać, bardziej niż zwykle lub w inny sposób "nie być sobą";
- stracić apetyt lub mieć zmniejszony apetyt; oraz
- nie chcieć jeść lub nie być w stanie jeść pokarmów stałych.

Tego rodzaju objawy są różne lub zmieniają się, z bólem narastającym, a potem ustępującym. Objawem charakterystycznym dla połknięcia baterii guzikowej i w kształcie monety są wymioty zawierające świeżą (jasnoczerwoną) krew. Jeśli taki objaw występuje u dziecka, należy natychmiast zwrócić się o pomoc medyczną.

Brak wyraźnych objawów jest powodem, dla którego należy zachować czujność w przypadku zużytych lub zapasowych baterii guzikowych / w kształcie monety, które są w domu i produktach, które je zawierają.

27. Odbiornik zasilany jest wymiennym akumulatorem litowo-jonowym. Płytką senostyczna jest zasilana wymienną litową baterią guzikową. Używać tylko zalecanych baterii wymiennych Angelcare (patrz Specyfikacja Techniczna).

- Istnieje ryzyko wybuchu w przypadku użycia nieprawidłowej baterii lub jej niewłaściwej wymiany. Należy odnieść się do instrukcji obsługi, aby zapoznać się z prawidłową instalacją baterii.
- NIE zwierać zacisków zasilania.

28. NIE mieszać starych oraz nowych baterii i używać tylko baterii wymiennych zalecanych przez Angelcare (patrz Specyfikacja Techniczna).

29. Bateria guzikowa jest małym elementem i stwarza ryzyko zadławienia – PRZECHOWYWAĆ w miejscu niedostępnym dla dzieci!

30. Zachować ostrożność w obchodzeniu się z bateriami, aby nie doprowadzić do zwarcia w wyniku kontaktu z materiałami przewodzącymi, takimi jak pierścienki, bransoletki i klucze.

31. Nie wolno dopuścić do przeładowania, zwarcia, odwrótnego ładowania, zniekształcenia lub spalenia baterii, aby zapobiec jednemu lub więcej z następujących zdarzeń: uwolnienie toksycznych materiałów, uwolnienie wodoru i/lub tlenu, wydzielanie gazu, wzrost temperatury powierzchni.

32. NIE próbować ładować baterii dołączonych do produktu lub wskazanych do użytkowania z produktem, które nie są przeznaczone do ładowania. Mogłoby to spowodować wyciek żrącego elektrolitu z baterii lub wybuch.

33. Należy unikać instalacji baterii w produkcie niezgodnie z polaryzacją. Odwrotne włożenie baterii może spowodować ładowanie, co może doprowadzić do wycieku lub wybuchu.

34. W przypadku typu baterii używanej w odbiorniku, może dojść do "spuchnięcia" baterii, jeżeli nie jest ona używana lub przechowywana prawidłowo, co obejmuje m.in. wiek, sposób użytkowania, warunki otoczenia (przegrzanie), nadmierne naładowanie i rozładowanie, używanie nieodpowiednich ładowarek, fizyczne uszkodzenie. Należy sprawdzić dostępne w internecie oświadczenie Angelcare w sprawie ostrzeżeń dotyczących baterii:

<https://angelcarebaby.com/battery-safety>

35. Wyjąć baterie z produktu, jeśli będzie on przechowywany dłużej niż 30 dni, ponieważ może dojść do wycieku elektrolitu z baterii i uszkodzenia produktu.

36. Zutyliżować zużyte baterie tak szybko jak jest to możliwe, ponieważ stwarzają one większe ryzyko wycieku w produkcie. Jeżeli doszło do wycieku z baterii, należy odpowiednio zutyliżować produkt.

37. NIE przechowywać produktu, ani dołączonych baterii, ani baterii wskazanych do użytkowania z tym produktem, w wysokiej temperaturze i warunkach wysokiej wilgotności oraz unikać bezpośredniego światła słonecznego – może to prowadzić do wycieku z baterii, "spuchnięcia" oraz potencjalnego uszkodzenia i zniszczenia. Bateria litowo-jonowa odbiornika powinna być przechowywana w temperaturze $23 \pm 5^{\circ}\text{C}$ ($73.4 \pm 9^{\circ}\text{F}$) przy wilgotności względnej $\leq 75\%$. Zawsze przechowywać produkt naładowany w ok. 50% i nie przechowywać dłużej niż 3 miesiące bez ładowania.

38. PRZESTROGA

- Istnieje niebezpieczeństwo wybuchu, gdy bateria zostanie niewłaściwie wymieniona. Wymieniać tylko na taki sam lub równoważny typ baterii.
- Bateria nie może być poddana działaniu bardzo wysokiej lub niskiej temperatury, niskiemu ciśnieniu powietrza na dużej wysokości, podczas użytkowania, przechowywania lub transportu.
- Wymiana baterii na inną, nieodpowiedniego typu, może spowodować wybuch lub wyciek łatwopalnej cieczy lub gazu.
- Wrzucenie baterii do ognia lub gorącego piekarnika, a także mechaniczne zgniecenie lub rozcięcie baterii, może spowodować wybuch.
- Pozostawienie baterii w bardzo wysokiej temperaturze otoczenia, może spowodować wybuch albo wyciek łatwopalnej cieczy lub gazu.
- Poddanie baterii bardzo niskiemu ciśnieniu powietrza, może spowodować wybuch albo wyciek łatwopalnej cieczy lub gazu.
- Nadajnik powinien być zamontowany na wysokości mniejszej niż 2 metry.
- Zastosowana tabliczka znamionowa jest umieszczona z tyłu obudowy produktu.

WAŻNE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

39. Płytką sensoryczna

- Jeżeli łóżeczko nie ma twardej, nieruchomej, całkowicie płaskiej i stabilnej powierzchni, włączając spód sprężynowy lub stelaż, należy umieścić twardą deskę pomiędzy dnem łóżeczka a płytką sensoryczną, aby zapewnić prawidłowe działanie urządzenia (patrz specyfikacja KROK 2).
- Płytką sensoryczna nadaje się do stosowania ze standardowymi materacami sprężynowymi i piankowymi, ale nie z materacami z pianką z pamięcią kształtu (w całości lub częściowo), materacami siatkowymi i łózkami wodnymi. W przypadku braku pewności co do kompatybilności materaca, prosimy o kontakt z firmą Angelcare.

40. Ten monitor wykorzystuje ogólnodostępne częstotliwości fal radiowych do przesyłania sygnałów. Odbiornik może odbierać sygnały lub zakłócenia z innych niań elektronicznych w okolicy. Sygnał monitora może także być odbierany w innych domach. W celu ochrony prywatności, należy upewnić się, że obie jednostki są WYŁĄCZONE, kiedy nie są używane.

41. Ochrona przewodu zasilającego - Chronić przewód zasilacza, by nie nadepnął na niego lub nie ścisnąć go meblami ani innymi przedmiotami. Przewody zasilania poprowadzić tak, aby nie było możliwości nadeptnięcia na nie lub ścisnięcia ich przedmiotami postawionymi na nich lub obok nich, zwracając szczególną uwagę na przewody i wtyczki, gniazda wtykowe i miejsca, w których łączą się z produktem. Gniazdko powinno znajdować się blisko urządzenia i być łatwo dostępne. Zasilacz sieciowy należy podłączyć do gniazdka, które jest najbliższe urządzeniu i jest łatwo dostępne. Aby odłączyć od zasilania sieciowego, odłączyć zasilacz. ZAPRZESTAJ używania zasilacza, jeśli zostanie on zniszczony lub uszkodzony w jakikolwiek sposób.

42. Używać tylko dodatków/akcesoriów i części zamiennych zalecanych przez producenta. Każdy montaż produktu powinien odbywać się zgodnie z instrukcjami producenta.

- NIE umieszczać produktu na niestabilnym wózku, stojaku, statywie, podpórce lub stole. Produkt może spaść, powodując poważne obrażenia u dziecka lub osoby dorosłej, może też zostać poważnie uszkodzony.

- Używać TYLKO podstawy sprzedawanej z produktem.
- Upewnić się, że części zamienne są dostarczone przez Angelcare i mają takie same parametry jak części oryginalne. Nieautoryzowane zamienniki mogą spowodować pożar lub porażenie prądem.

43. Odłączyć urządzenie od prądu podczas burzy lub gdy nie jest używane przez dłuższy czas.

44. Naprawianie - NIE próbować samodzielnie naprawiać produktu, ponieważ otwarcie lub zdjęcie obudowy (poza pokrywą baterii) może grozić porażeniem prądem lub stwarzać inne zagrożenia.

- **Zasilanie** – patrz Specyfikacja Techniczna w tej instrukcji obsługi.

45. Przeciężenie - NIE przeciążać gniazdek ściennych, przedłużaczy ani wewnętrznych gniazd wtykowych, gdyż może to spowodować ryzyko pożaru lub porażenia elektrycznego.

46. Antena nadajnika - Antena używana z tym nadajnikiem musi być zainstalowana tak, aby zapewniona była odległość co najmniej 20 cm (8") od wszystkich osób i nie może znajdować się w pobliżu innych anten, ani współdziałać z innymi antenami lub nadajnikami.

47. Czyszczenie - Przed czyszczeniem odłączyć wszystkie jednostki. NIE zanurzać żadnej części monitora w wodzie. Czyścić tylko przy użyciu suchej ściereczki.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE INSTALACJI

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA





- 1 Nadajnik
- 2 Stojak/Uchwyt ścienny (do nadajnika)
- 3 2 zasilacze AC
- 4 Odbiornik
- 5 Akumulator litowo-jonowy (do odbiornika)
- 6 Płytki sensoryczna
- 7 Bateria CR2450 3V (do płytki sensorycznej)
- 8 Wkręty (do montażu ściennego)

POTRZEBNE ELEMENTY

Twarda płyta, jeżeli łóżeczko nie ma twardej powierzchni (patrz specyfikacja w KROKU 2).

Wiertarka lub śrubokręt (do montażu na ścianie).

1- URUCHAMIANIE ODBIORNIKA

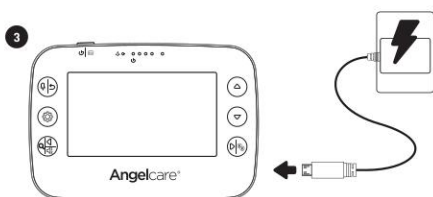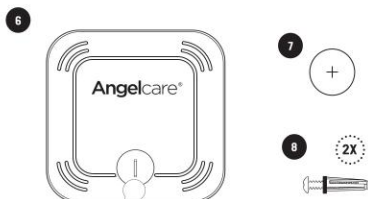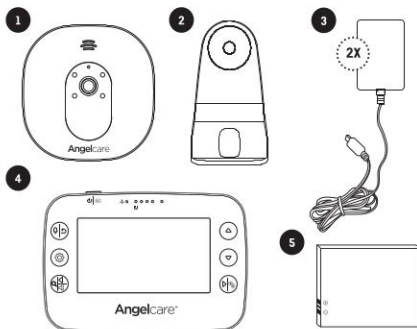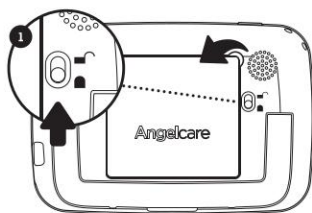


Przed pierwszym użyciem odbiornik należy ładować przez 8 godzin.


Normalny czas ładowania wynosi 6 godzin.

2-INSTALACJA PŁYTKI SENSORYCZNEJ


Płytki sensoryczna jest zaprojektowana do wykrywania delikatnych ruchów dziecka na powierzchni materaca. Alarm uruchomi się tylko wtedy, jeśli **ŻADEN** ruch nie zostanie wykryty przez 20 sekund.

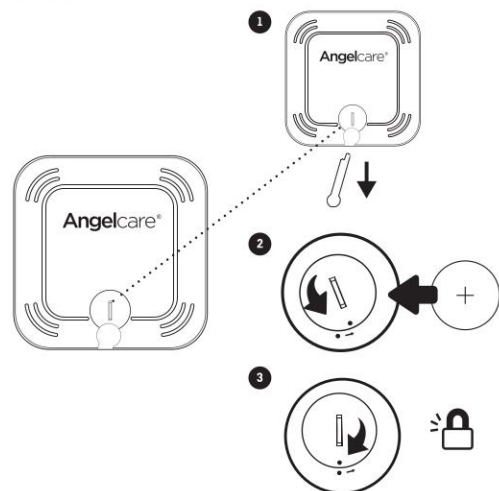

1. Usunąć pasek z komory baterii.
2. Za pomocą monety zdjąć pokrywę baterii i włożyć baterię stroną ze znakiem + skierowaną do góry.
3. Założyć pokrywę baterii, dopasować 2 kropki i kliknąć, aby ją zamocować.

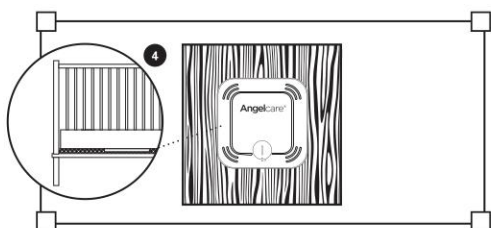


4. Wyjąć materac z łóżeczka, umieścić płytkę sensoryczną - z logo Angelcare® skierowanym do góry - na dnie, mniej więcej w środkowej części materaca. Powinna znajdować się na środku twardej płyty, jeżeli łóżeczko wymaga jej stosowania (patrz część 'WAŻNE' poniżej).
5. Włożyć materac do łóżeczka.

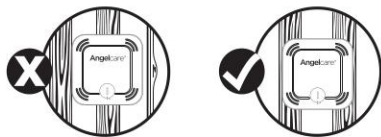


**Prawidłowe
ułożenie na stelażu**

! WAŻNE

- Jeśli łóżeczko nie ma twardej, nieruchomej, całkowicie płaskiej i stabilnej powierzchni, bądź jeśli ma spód sprężynowy lub stelaż, pomiędzy spodem/ stelażem łóżeczka a płytką sensoryczną należy umieścić twardą płytę, aby zapewnić prawidłową pracę urządzenia. Minimalne wymiary twardej płyty to 30 x 30 cm a grubość 6 mm. Twarda płyta musi być większa niż powierzchnia płytki sensorycznej.
- Płytkę sensoryczną nadaje się do stosowania ze standardowymi materacami sprężynowymi i piankowymi, ale nie z materacami z pianką z pamięcią kształtu (w całości lub częściowo), materacami siatkowymi i łózkami wodnymi. W przypadku braku pewności co do zgodności materaca, należy skontaktować się z firmą Angelcare. Twarda płyta wywiera stały nacisk na płytkę sensoryczną, umożliwiając wykrywanie ruchów dziecka nawet wtedy, gdy dziecko znajduje się przy brzegu łóżeczka.

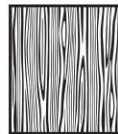

3-MONTAŻ NADAJNIKA

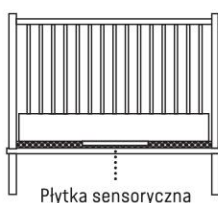


Umieścić nadajnik i przewód zasilacza w odległości co najmniej **1 metra** od łóżeczka




MONTAŻ NA ŚCIANIE

UWAGA: Przed przymocowaniem do ściany, przejrzyj obie opcje montażu na ścianie, aby uzyskać najlepszy widok z kamery.


Opcja 1 - Bliski zasięg widzenia (wskazówka - odległość od ściany do łóżeczka 1.0 do 1.5 m)

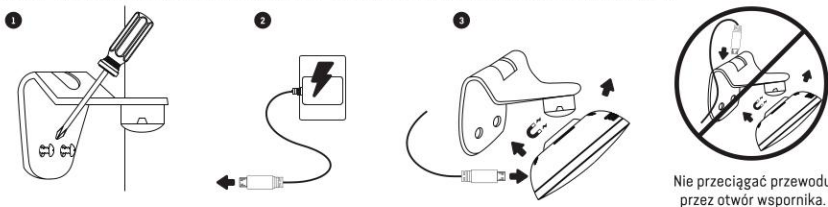

Opcja 2 - Większy zasięg widzenia (wskazówka - odległość od ściany do łóżeczka 1.5 m lub więcej)

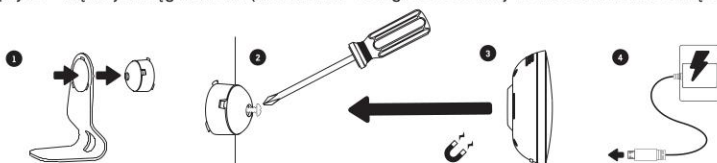


MONTAŻ NA BLACIE

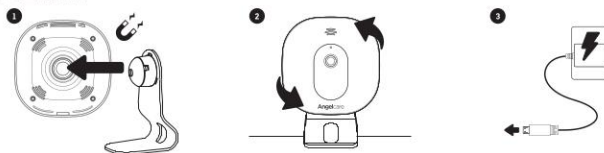

4-WŁĄCZANIE NIANI ELEKTRONICZNEJ

Alarm płytki sensorycznej włączy się po kilku sekundach, jeżeli dziecko nie jest w łóżeczku.

NADAJNIK

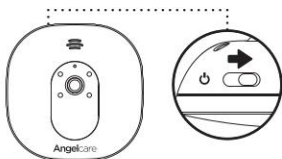

ODBIORNIK



Uwaga:

- Nadajnik i odbiornik są już sparowane.
- Po każdym **WŁĄCZENIU** zasilania nadajnika, wewnętrzny termometr musi zostać skalibrowany, aby zapewnić dokładność pomiarów. Ten automatyczny proces potrwa około 30 minut.

PAUZOWANIE I PONOWNE URUCHAMIANIE PŁYTKI CZUJNIKA

- Umożliwia pauzowanie płytki sensorycznej, kiedy dziecko jest wyjmowane z łóżeczka, np. w celu nakarmienia lub utulenia. Przycisk ma delikatne światło, jest więc dobrze widoczny. Należy upewnić się, że płytka sensoryczna została ponownie uruchomiona przed włożeniem dziecka do łóżeczka.

NADAJNIK



ODBIORNIK



TEST PŁYTKI SENSORYCZNEJ

1. Źródła ruchu i wibracji inne niż Twoje dziecko mogą być wykryte przez płytkę sensoryczną i zakłócać prawidłowe działanie monitora Angelcare. Alarm nie zostanie wyemitowany, jeśli urządzenie wykryje ruch inny niż ruch Twojego dziecka.
2. Są 4 poziomy ustawienia czułości. Urządzenie ustawione jest na poziomie 3 (domyślnie) i może być odpowiednio dostosowane.
3. Płytki sensoryczna wykryje fałszywe ruchy, jeżeli dotykasz łóżeczka.
4. Monitor wyemituje pojedynczy dźwięk alarmu wstępnego, jeżeli żaden ruch nie zostanie wykryty przez 15 sekund. Jeżeli kolejny ruch nie zostanie wykryty, główny alarm zostanie wyemitowany po 20 sekundach jako seria ciągłych dźwięków.

TEST PŁYTKI SENSORYCZNEJ DLA CZTERECH NAROŻNIKÓW

1. Umieścić płytkę sensoryczną mniej więcej w środkowej części powierzchni, na której śpi dziecko i położyć materac z powrotem na miejscu.
2. WŁĄCZYĆ nadajnik i odbiornik – sprawdzić czy są sparowane (połączone).
3. Natychmiast delikatnie poklepać dłońmi raz po raz narożnik materaca **dwukrotnie**, aby czujnik wykrył ruch. Po wykryciu ruchu co 5 sekund emitowany będzie dźwięk TIC, a odbiornik będzie migał na zielono w przypadku jednej płytki.
4. Odsunąć się od łóżeczka.
5. Alarm z nadajnika i odbiornika zostanie wyemitowany po 20 sekundach. Jeżeli alarm **nie zostanie wyemitowany**, należy upewnić się, że instalacja została przeprowadzona poprawnie i spróbować ponownie; sprawdzić poziomy naładowania baterii wszystkich jednostek, postępować według instrukcji 'BRAK ALARMÓW' – ustawienie czułości może wymagać obniżenia o jeden poziom ze względu na inne wibracje/ruchy.
6. Jeśli alarm zostanie wyemitowany, delikatnie poklepać dłońmi narożnik materaca **dwukrotnie**, aby czujnik wykrył ruch. Może to zająć do 8 sekund, zanim ruch zostanie rozpoznany a alarm się zakończy.
7. Jeśli alarm nadal trwa, nawet po delikatnym dwukrotnym poklepaniu narożnika materaca, należy zwiększyć czułość i powtórzyć test.






WAŻNE

- Przed pierwszym użyciem należy przetestować monitor.
- Przed użyciem i w regularnych odstępach czasu (przed położeniem dziecka w łóżeczku), należy zawsze sprawdzać czy płytka nie wykrywa żadnych ruchów ani wibracji w swoim otoczeniu.
- Monitor należy przetestować za każdym razem, gdy płytka zostaje przeniesiona w inne miejsce.

5-OBSŁUGA NIANI ELEKTRONICZNEJ

NADAJNIK

- 1 Głośnik
- 2 Mikrofon
- 3 Obiektyw kamery
- 4 Wskaźnik zasilania
- 5 Złącze micro USB
- 6 Wstrzymanie płytki sensorycznej / Przycisk parowania
- 7 **WŁ./WYŁ. ZASILANIA**
- 8 Magnes do stojaka i montaż na ścianie

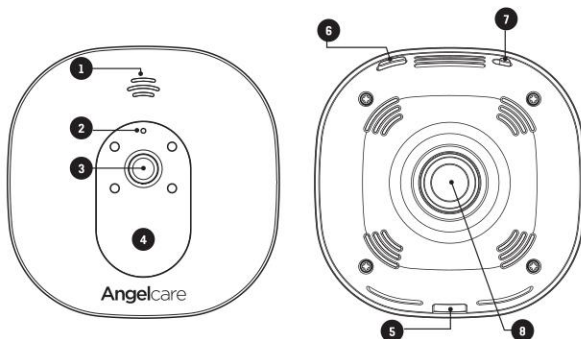


WIDOK Z PRZODU


WIDOK Z TYŁU

ODBIORNIK

- 1 **WŁ./WYŁ. zasilania** (naciśnąć i przytrzymać) / Tryb uśpienia (szybko naciśnąć i zwolnić)
- 2 Komunikacja / Powrót i zapisywanie ustawień
- 3 Menu / Wybór
- 4 Funkcje zoom i pan / Nawigacja w lewo / Przełączanie dźwięku nadajnika
- 5 Wskaźnik ruchu (funkcja TIC)
- 6 Wskaźnik zasilania
- 7 Wizualny wskaźnik dźwięku
- 8 Mikrofon
- 9 Podgłaśnianie / Nawigacja w górę
- 10 Przyciszenie / Nawigacja w dół
- 11 Tryb widoku / Nawigacja w prawo
- 12 Komora akumulatora
- 13 Złącze micro USB do ładowania
- 14 Głośnik
- 15 Składana podpórka

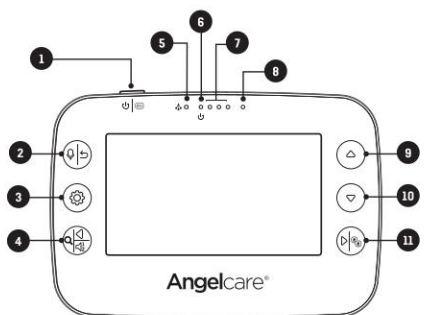


WIDOK Z PRZODU

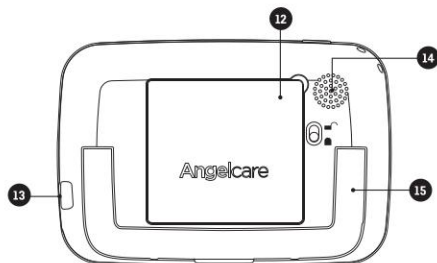

WIDOK Z TYŁU

GÓRNY PASEK STANU

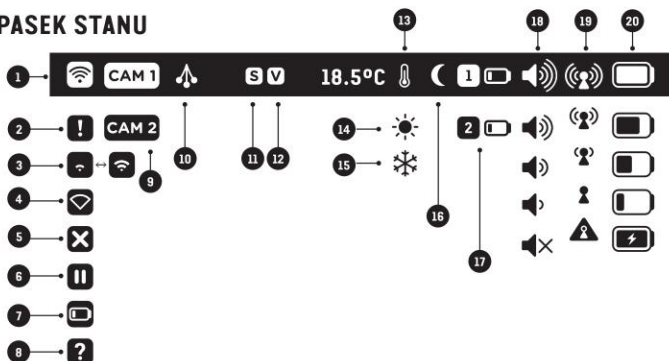




- | | | |
|---|---|--|
| <p>1 Wykrywanie ruchów przez płytkę sensoryczną jest aktywowane</p> <p>2 Alarm płytki sensorycznej</p> <p>3 Płytkę sensoryczną łączy się</p> <p>4 Płytkę sensoryczną straciła połączenie</p> <p>5 Wykrywanie ruchów przez płytkę sensoryczną jest WYŁĄCZONE</p> <p>6 Płytkę sensoryczną jest wstrzymana</p> <p>7 Płytkę sensoryczną ma małą moc</p> | <p>8 Płytkę sensoryczną nigdy nie została sparowana</p> <p>9 Wybrany nadajnik i nadawany dźwięk</p> <p>10 Funkcja TIC jest aktywowana</p> <p>11 Dźwięk VOX jest aktywowany</p> <p>12 Video VOX jest aktywowane</p> <p>13 Alarm temperatury jest aktywowany</p> <p>14 Alarm temperatury: za gorąco</p> | <p>15 Alarm temperatury: za zimno</p> <p>16 Nocne widzenie aktywowane</p> <p>17 Druga płytkę sensoryczną ma słabą baterię (wyswietlane tylko wtedy, gdy sparowane są 2 płytki sensoryczne)</p> <p>18 Wskaźnik poziomu głośności</p> <p>19 Wskaźnik jakości odbioru</p> <p>20 Wskaźnik poziomu baterii odbiornika</p> |
|---|---|--|

MENU GŁÓWNE




- 1 Aktywacja płytki sensorycznej**
WL.: Odbiornik i nadajnik wyemitują alarm, jeśli przez 20 sekund nie zostanie wykryty żaden ruch.
PUZA: Pozwala wstrzymać działanie płytki sensorycznej, kiedy dziecko jest wyjmowane z łóżeczka np. w celu nakarmienia lub utulenia.
 - Ikona paazy na pasku stanu będzie migać.
 - Wskaźnik zasilania nadajnika będzie wolno migać.
 Przed włożeniem dziecka do łóżeczka, należy upewnić się, że działanie płytki sensorycznej zostało wznowione (WŁĄCZYĆ wykrywanie ruchów).
WYL.: Kiedy dziecko jest już starsze, można WYŁĄCZYĆ wykrywanie ruchu i używać niani elektronicznej tylko do przekazu obrazu i dźwięku.
- 2 Aktywacja funkcji TIC:**
 Umożliwia słyszenie dźwięku Tic co 5 sekund, kiedy aktywowane jest wykrywanie ruchów. Jeśli podłączone są dwie płytki sensoryczne, wskaźnik Tic będzie migał na zielono dla płytki sensorycznej 1 i na niebiesko dla płytki sensorycznej 2.
- 3 Konfiguracja dźwięku VOX:** Dźwięk VOX oznacza, że urządzenie będzie przysyłać dźwięki tylko wtedy, kiedy je wykryje, w zależności od ustawionego poziomu czułości (poziom 4 to największa czułość). Aby oszczędzać energię, transmisja dźwięku zatrzyma się po 10 sekundach, jeśli nie jest wykrywany żaden dźwięk. **Dźwięk VOX WYŁĄCZONY** oznacza, że dźwięk jest stale transmitowany i rejestrowane są wszystkie dźwięki.
- 4 Konfiguracja Video VOX:** VOX Video oznacza, że kiedy odbiornik jest w trybie uśpienia (czarny ekran), ekran WŁĄCZY się tylko wtedy, gdy monitor wykryje dźwięki, w oparciu o ustawienia poziomu czułości (poziom 4 to największa czułość). Aby oszczędzać energię, po ustawionym czasie zostanie aktywowany tryb uśpienia. **Video VOX WYŁĄCZONE** oznacza, że ekran odbiornika nie włączy się, jeśli nadajnik odbiera dźwięki.
- 5 Jasność ekranu**
- 6 Ustawienia temperatury**
- 7 Ustawienia ogólne**

WAŻNE

- W celu potwierdzenia ustawień, należy zawsze nacisnąć przycisk . Na ekranie pojawi się ikona potwierdzenia: ustawienia zostały zapisane  ustawienia nie zostały zapisane .
- W przypadku 2 nadajników i 2 płytek sensorycznych sparowanych z nią elektronicznie, można zmienić tylko ustawienia nadajnika będącego na podglądzie.
- Jeżeli ikona funkcyjna wyświetla się na szaro, oznacza to brak możliwości używania lub zmiany ustawień.

MENU USTAWIENIŃ TEMPERATURY

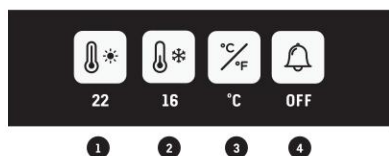

- 1 Ustawianie alarmu wyżej temperatury
- 2 Ustawianie alarmu niższej temperatury
Uwaga: Różnica między temperaturą minimalną a maksymalną nie może być mniejsza niż 4°C / 7°F.
- 3 Ustawianie wyświetlania temperatury w stopniach Celsjusza lub Fahrenheita
- 4 Aktywacja alarmu temperatury

MENU USTAWIENIŃ OGÓLNYCH



- 1 Ustawianie trybu uśpienia
- 2 Ustawianie czułości płytki sensorycznej
Aby zapewnić odpowiednie monitorowanie ruchów dziecka, można dostosować czułość płytki sensorycznej.
- 3 Ustawianie poziomu głośnika nadajnika
- 4 Menu parowania


MENU PAROWANIA




- 1 Status nadajnika 1
- 2 Status nadajnika 2
- 3 Status płytki sensorycznej 1


Ikony statusu nadajnika i płytki sensorycznej:


OK zielony: połączone/sparowane


 **niebieski:** dodaj nadajnik lub płytkę sensoryczną

 **czerwony:** usuń nadajnik lub płytkę sensoryczną

Proces potwierdzenia NA EKRANIE:

 **niebieski:** ikona połączenia zmienia się podczas parowania (limit czasu łączenia: 60 sekund)

 **zielony:** parowanie zakończone powodzeniem

 **czerwony:** nieudane parowanie, należy spróbować ponownie

IKONY ALARMÓW



- 1 Alarm płytki sensorycznej:** Jeżeli przez 20 sekund nie zostanie wykryty ŻADEN ruch, głośniki odbiornika i nadajnika wyemitują głośne następujące po sobie dźwięki - jest to alarm ruchu.
- 2 Płytkę sensoryczną jest wstrzymana**
- 3 Płytkę sensoryczną utraciła połączenie:** Głośniki odbiornika i nadajnika będą emitować kolejne głośne sygnały dźwiękowe.
- 4 Płytkę sensoryczną ma słabą baterię:** Odbiornik będzie emitował 3 następujące po sobie dźwięki co 5 sekund.
- 5 Odbiornik jest poza zasięgiem:** Odbiornik będzie emitował 2 następujące po sobie dźwięki co 10 sekund.
- 6 Temperatura jest za niska:** Odbiornik będzie emitował 3 kolejne dźwięki co 5 sekund.
- 7 Temperatura jest za wysoka:** Odbiornik będzie emitował 3 następujące po sobie dźwięki co 5 sekund.

Uwaga: Nacisnąć dowolny przycisk, **żeby zatrzymać alarm** i usunąć ikonę alarmu.

W przypadku **alarmu płytki sensorycznej**, niania elektroniczna wstrzyma działanie płytki sensorycznej. W trybie paazy, funkcja wykrywania ruchów jest nieaktywna. W celu ponownej aktywacji płytki sensorycznej, należy po prostu usunąć pauzę płytki w pierwszym menu.

6-ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

POSTĘPOWANIE Z AKUMULATOREM

- Przed pierwszym użyciem ładować akumulator przez 8 godzin, aż do pełnego naładowania
- Aby zapewnić maksymalną żywotność akumulatora, zaleca się okresowo całkowicie rozładować akumulator. Jeżeli odbiornik nie jest używany, należy go **WYŁĄCZYĆ**.

BRAK TRANSMISJI DŹWIĘKU

- Sprawdzić poziom głośności odbiornika i nadajnika, aby upewnić się, że mają ustawiony odpowiedni poziom.
- Przybliżyć odbiornik do nadajnika, żeby sprawdzić czy słychać dźwięk.
- Naładować odbiornik.

SŁABY ODBIÓR

- Zbliżyć do siebie nadajnik i odbiornik.
- Zmienić pozycję jednej lub obu jednostek.
- Położyć nadajnik i odbiornik na płaskiej powierzchni, poza zasięgiem dziecka.
- Naładować odbiornik.

ZAKŁÓCENIA STATYCZNE, ZNIEKSZTAŁCENIA, ZAKŁÓCENIA (OD INNYCH NIAŃ ELEKTRONICZNYCH, TELEFONÓW BEZPRZEWODOWYCH, WALKIE-TALKIE, ITD.)

- Obrócić odbiornik lub oddalić go od źródła zakłóceń.

SPRZĘŻENIE ZWROTNE (GŁOSNE DŹWIĘKI EMITOWANE Z ODBIORNIKA)

- Zwiększyć odległość między nadajnikiem a odbiornikiem (do co najmniej 3 metrów).
- Zmniejszyć głośność odbiornika.

EKRAN ODBIORNIKA JEST CZARNY (ODBIORNIK JEST WYŁĄCZONY)

- Ponownie **WYŁĄCZYĆ** odbiornik naciskając przycisk **ZASILANIA ON/OFF** i przytrzymując go przez 2 sekundy.
- Naładować odbiornik.

PŁYTKA SENSORYCZNA - BRAK ALARMU

- Źródła ruchu i wibracji, inne niż dziecko, mogą być wykrywane przez płytkę sensoryczną i alarm nie zostanie wyemitowany.
- Należy zapoznać się z ostrzeżeniami 3 do 11 i sprawdzić KROK 4 - TEST PŁYTKI SENSORYCZNEJ.

PŁYTKA SENSORYCZNA - FAŁSZYWE ALARMY

- Wymienić baterię płytki sensorycznej CR2450.
- **WYŁĄCZYĆ** nadajnik.
- Fałszywe alarmy płytki sensorycznej mogą wystąpić z kilku powodów. Zawsze należy natychmiast sprawdzić, co dzieje się z dzieckiem, kiedy zostanie wyemitowany alarm:
 - Nadajnik nie został **WYŁĄCZONY** po wyjściu dziecka z łóżeczka.
 - Upewnić się, że między materacem a płytką sensoryczną nie ma pościeli.
 - Płytkę sensoryczną nie została poprawnie umieszczona pod materacem. Upewnić się, że płytkę sensoryczną leży na płaskiej, twardej powierzchni, stroną z nadrukiem skierowaną do góry.
 - Poziom czułości może wymagać wyregulowania.
- Należy zapoznać się z ostrzeżeniami 3 do 11 i sprawdzić KROK 4 - TEST PŁYTKI SENSORYCZNEJ.

BRAK TRANSMISJI DŹWIĘKU




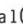

- Sprawdzić czy nadajnik i odbiornik są **WYŁĄCZONE (ON)**.
- Sprawdzić czy odbiornik nie jest **WYCISZONY (MUTE)**.


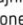

SPRAWDZANIE AKUMULATORA ODBIORNIKA




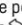
- Odłączyć zasilacz od odbiornika i sprawdzić wskaźnik poziomu naładowania akumulatora.


BRAK POŁĄCZENIA MIĘDZY NADAJNIKIEM A ODBIORNIKIEM

· Jeśli nadajnik straci łączność z odbiornikiem, należy je ponownie sparować, zgodnie z poniższymi krokami.

1. WŁĄCZYĆ odbiornik, a nadajnik zostawić WYŁĄCZONY.
2. Nacisnąć przycisk menu .
3. Spowoduje to przejście bezpośrednio do menu ustawień głównych. Wybrać ikonę parowania  i nacisnąć przycisk menu .
4. W menu parowania wybrać ikonę nadajnika 1  i nacisnąć przycisk menu .

Jeśli nadajnik 1 jest oznaczony jako połączony  należy go wybrać, aby przejść do opcji parowania nadajnika 1. Należy je teraz usunąć, wybierając czerwoną ikonę . Ikona łączenia będzie wyświetlać się na ekranie do czasu aż pojawi się ikona parowania  zakończonego powodzeniem. Można teraz przejść do kroku 4.

5. Na ekranie wyświetli się ikona łączenia .
6. WŁĄCZYĆ nadajnik, nacisnąć i przytrzymać przycisk "pauzy/parowania" do czasu aż LED zasilania zacznie migać podczas parowania.
7. Jeżeli połączenie zostało utworzone, na ekranie wyświetli się zielona ikona parowania zakończonego powodzeniem , a w menu pojawi się ikona prawidłowego parowania .
8. W innym wypadku na ekranie pojawi się czerwona ikona nieudanego parowania . Należy spróbować jeszcze raz.

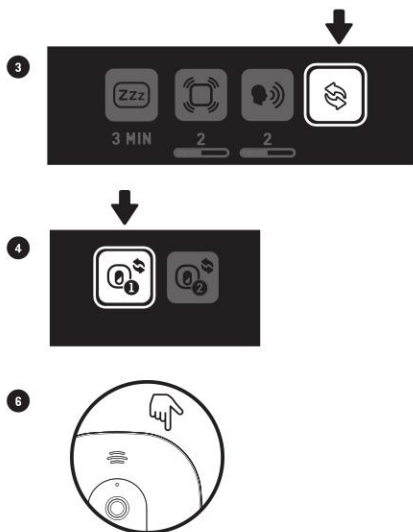









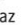

BRAK POŁĄCZENIA MIĘDZY PŁYTKĄ SENSORYCZNĄ A NADAJNIKIEM




· Jeśli płytka sensoryczna straci łączność z nadajnikiem, należy postępować zgodnie z instrukcją poniżej, aby je ponownie sparować. W celu ponownego połączenia płytki sensorycznej z nadajnikiem, najpierw należy upewnić się, że nadajnik jest sparowany z odbiornikiem.


1. Wyjąć baterię z płytki sensorycznej.

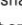Uwaga: W przypadku podłączonych dwóch płytek sensorycznych, najpierw należy wyjąć baterie z nich obu, a potem postępować według kroków poniżej.

2. Nacisnąć przycisk menu .
3. Wybrać menu ustawień ogólnych  i nacisnąć przycisk menu .
4. Wybrać ikonę parowania  i nacisnąć przycisk menu .
5. W menu parowania wybrać ikonę płytki sensorycznej 1  i nacisnąć przycisk menu .

Jeżeli płytka sensoryczna jest oznaczona jako połączona  należy ją wybrać, aby przejść do opcji parowania płytki sensorycznej. Należy teraz je usunąć, wybierając czerwoną ikonę . Ikona łączenia będzie wyświetlać się na ekranie do czasu, aż pojawi się ikona parowania zakończonego powodzeniem . Wtedy można przejść do kroku 5.

6. Włożyć baterię do płytki sensorycznej. Spowoduje to jej automatyczną aktywację.
7. Jeżeli połączenie zostało ustanowione, na ekranie pojawi się zielona ikona udanego parowania  i w menu pojawi się ikona parowania OK .
8. W przeciwnym razie, czerwona ikona nieudanego parowania  pojawi się na ekranie. Należy spróbować ponownie.

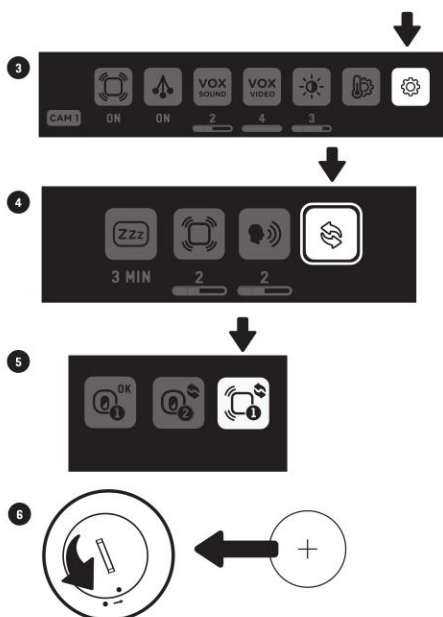

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zasięg

Otwarta przestrzeń (otwarty teren bez przeszkód):

- między nadajnikiem a odbiornikiem:
do 250 metrów
- między nadajnikiem a płytką sensoryczną:
do 20 metrów

Liczba kanałów

Europa: 19 kanałów.

Wskazówki dotyczące termometru

Alarm wysokiej temperatury: 22°C

Alarm niskiej temperatury: 16°C

Zasilanie

1 dołączona bateria litowo-jonowa (IS275) 1300 mAh 3.7V (wyprodukowana przez Icon Energy System (Shenzhen) Co Ltd) do odbiornika.

2 x 100-240 VAC/ 5V DC 0.6A Dongguan Guanjin Electronics Technology Co., Ltd (UE: K05S050060G lub K05V050060G, UK: K05S050060B lub K05B050060B, AU: K05S050060A) zasilacze do odbiornika i nadajnika.

1 dołączona bateria CR2450 3V (Changzhou Jin Tan Chao Chuang Battery Co., Ltd. model numer: CR2450H, lub GP Batteries International Ltd. model numer: CR2450) do bezprzewodowej płytki sensorycznej).

Przeostoga: Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem, nie wystawiać tego produktu do działania deszczu lub wilgoci.

Istnieje niebezpieczeństwo wybuchu w przypadku nieprawidłowej wymiany baterii. Bateria dołączona do odbiornika, to akumulator litowo-jonowy, który może być wymieniany przez użytkownika. Używać wyłącznie baterii zalecanych przez firmę Angelcarey. Bateria do płytki sensorycznej może być wymieniana przez użytkownika i jest to bateria litowa (nie litowo-jonowa), bateria ta NIE jest przeznaczona do ładowania. Aby uzyskać więcej informacji na temat zamiennych baterii, prosimy o skontaktowanie się z obsługą klienta Angelcare: www.angelcarebaby.com lub lokalnym

Zgodność z dyrektywą ErP

UŻYWAĆ TYLKO NASTĘPUJĄCYCH MODELI ZASILACZY

MARKI ANGELCARE® O NUMERACH:

EU: K05S050060G or K05V050060G

UK: K05S050060B or K05B050060B,

AU: K05S050060A

dysybutorem. Instrukcje będą dołączone do baterii.

Baterie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Baterie

PRZEOSTROGA: ISTNIEJE RYZYKO WYBUCHU, JEŻELI BATERIA ZOSTANIE WYMIENIONA NA BATERIĘ NIEODPOWIEDNIEGO TYPU. ZUŻYTE BATERIE NALEŻY ZUTYLIZOWAĆ ZGODNIE Z INSTRUKCJAMI.

Transmisja

Przesyłanie danych między odbiornikiem a nadajnikiem odbywa się na częstotliwości 2.4 GHz.

Przesyłanie danych między nadajnikiem a płytką sensoryczną odbywa się na częstotliwości 2.4 GHz.

Angelcare Canada Inc. niniejszym oświadcza, że ta niania elektroniczna jest zgodna z Dyrektywą 2014/53/EU.

Pełna treść deklaracji zgodności UE jest dostępna pod następującym adresem internetowym:

<https://www.angelcarebaby.com/declaration-of-conformity>

Ekspozycja na promieniowanie radiowe - To urządzenie zostało zaprojektowane i wyprodukowane tak, aby spełniało wartości graniczne narażenia na promieniowanie o częstotliwości radiowej (RF) w UE w niekontrolowanym środowisku. W celu zachowania zgodności, nadajnik powinien być umieszczony nie bliżej niż 20 cm od ciała człowieka, podczas normalnego działania.

OCHRONA ŚRODOWISKA

Symbole przekreślonego kosza na śmieci informują, że zgodnie z miejscowymi przepisami i regulacjami tego produktu i/lub jego baterii nie wolno utylizować razem z odpadami domowymi. Kiedy okres eksploatacji produktu/baterii dobiegnie końca, należy zutylizować je w miejscu zbiórki odpadów wyznaczonym przez lokalne władze. Oddzielna utylizacja i recykling przyczynią się do ochrony zasobów naturalnych, ludzkiego zdrowia i środowiska. Informacje na temat wyjmowania baterii można znaleźć w instrukcji obsługi.

Oznakowanie dotyczące zgodności znajduje się na produkcie.



OBŚLUGA KLIENTA - OGRANICZONA GWARANCJA

Angelcare® gwarantuje pierwotnemu właścicielowi tego produktu, że jest on wolny od wszelkich wad materiałowych i wad wykonania przez okres gwarancyjny (okres gwarancji dla danego kraju można znaleźć w tabeli poniżej). Jeżeli ten system monitorowania nie działa prawidłowo podczas używania go w normalnych warunkach, zgodnie z zaleceniami i w trakcie okresu gwarancyjnego, Angelcare® bezpłatnie naprawi lub wymieni produkt, według własnego uznania. W celu potwierdzenia gwarancji oraz okresu jej trwania, prosimy o kontakt z lokalnym dystrybutorem.

Do produktu musi być dołączony dowód zakupu, rachunek albo inny dowód potwierdzający, że system do monitorowania jest w okresie gwarancyjnym. Angelcare® poniesie koszty naprawy lub wymiany produktu i wysłania go z powrotem do klienta.

Gwarancja nie obejmuje produktu uszkodzonego w wyniku nieprawidłowej konserwacji, wypadku, zasilania nieprawidłowym napięciem lub innych form nieprawidłowej eksploatacji.

Gwarancja traci ważność także w przypadku, gdy użytkownik dokonuje jakichkolwiek napraw lub modyfikacji produktu. Angelcare® nie ponosi odpowiedzialności za szkody przypadkowe lub wypadkowe związane z tym produktem. Gwarancja wyklucza także formy odpowiedzialności inne niż określone powyżej. Nie udzielane są żadne inne gwarancje.

Ta gwarancja nie obejmuje produktów i akcesoriów marek innych niż Angelcare®, ani żadnych problemów, które wynikają z używania niezgodnego z instrukcją obsługi produktu, niestosowania się do dołączonych instrukcji, lub problemów spowodowanych przez używanie akcesoriów, części lub komponentów niedostarczonych przez Angelcare.

PRZEPISY PRAWNE RÓŻNIĄ SIĘ W ZALEŻNOŚCI OD KRAJU. W NIEKTÓRYCH KRAJACH NIE JEST DOZWOLONE WYŁĄCZENIE LUB OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY PRZYPADKOWE LUB WYNIKOWE, ZATEM POWYŻSZE OGRANICZENIA MOGĄ NIE DOTYCZYĆ UŻYTKOWNIKA.

NIE JESTEŚMY W ŻADEN SPOŚÓB ODPOWIEDZIALNI ZA JAKIEKOLWIEK REZULTATY WYNIKAJĄCE Z UŻYWANIA PRODUKTU.

WAŻNE! Monitor Angelcare® jest produktem osobistego użytku. Prosimy o niezwracanie go do sklepu. W razie pytań lub potrzeby uzyskania pomocy, prosimy o kontakt z dystrybutorem przed dokonaniem zwrotu.

Aby uzyskać informacje na temat gwarancji, prosimy o kontakt z dystrybutorem. Listę dystrybutorów można znaleźć na naszej stronie: <https://international.angelcarebaby.com/>

Okres gwarancyjny według krajów	
UK, Ameryka Północna, Rosja, Afryka Południowa	1 rok
Pozostałe kraje	2 lata

Informacje kontaktowe

WAŻNE! Niania elektroniczna Angelcare® jest produktem osobistego użytku. Prosimy o niezwracanie go do sklepu. W przypadku pytań lub konieczności uzyskania pomocy, przed zwróceniem produktu prosimy o kontakt z dystrybutorem.

Firma Angelcare® gwarantuje wysoką jakość wszystkich swoich produktów. W przypadku braku pełnej satysfakcji lub pytań prosimy o kontakt z dystrybutorem przed zwróceniem produktu:

Stany Zjednoczone i Kanada: prosimy o kontakt pod adresem: info@angelcarebaby.com

Pozostałe kraje: Znajdź swojego lokalnego dystrybutora na naszej stronie internetowej: angelcarebaby.com/distributors

WIĘCEJ INFORMACJI

Aby dowiedzieć się więcej, zobacz **filmy dotyczące instalacji** i inne przydatne materiały na naszej stronie internetowej.

<https://angelcare.zendesk.com/hc/>

www.angelcarebaby.com

Angelcare Canada Inc.

2000 McGill College Avenue, Suite 250
Montreal, Quebec, Canada, H3A 3H3