


## **iRest GRANDEASE (A550) Fotel masujący**

**ZACHOWAJ INSTRUKCJĘ**

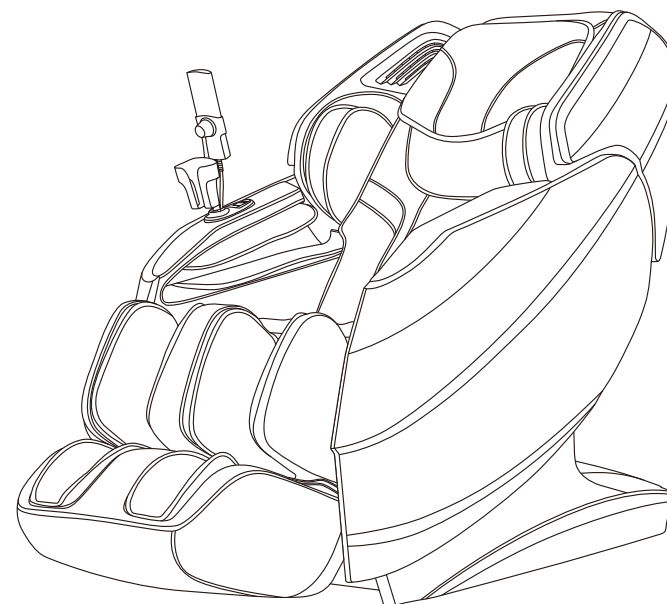

**INSTRUKCJA OBSŁUGI**

Dziękujemy za zakup urządzenia. Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją obsługi, aby przed uruchomieniem fotela masującego dowiedzieć się, jak prawidłowo z niego korzystać. W szczególności prosimy o zapoznanie się z przeciwwskazaniami oraz zasadami bezpiecznego użytkowania.

Uwaga: Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w projekcie urządzenia i jego opisie. Jeśli istnieje jakaś różnica między funkcją urządzenia dostępnego na rynku a opisem w instrukcji, to wynika ona ze zwykłej aktualizacji urządzenia, a producent nie ma obowiązku informowania o tym fakcie. Kolor zilustrowany w instrukcji obsługi nie reprezentuje aktualnej kolorystyki fotela masującego.

## **SPIS TREŚCI**

### **Przed pierwszym użyciem**

---

Środki ostrożności -----	62-64
Elementy montażowe -----	65-67
Umieszczenie fotela masującego -----	68-69
Przed użyciem -----	70-71
Budowa urządzenia -----	72-78

### **Sposób użytkowania**

---

Instrukcja obsługi -----	79-116
Zakończenie masażu -----	116

### **Konserwacja**

---

Czyszczenie i konserwacja -----	117
---------------------------------	-----



### **Ważne**

---


Rozwiązywanie problemów -----	118
Specyfikacja techniczna urządzenia -----	119


## Środki ostrożności (muszą być przestrzegane)

- Przed użyciem należy uważnie przeczytać wszystkie istotne instrukcje.
- Zawarte tu wskazówki pomogą bezpiecznie i prawidłowo korzystać z urządzenia.
- Aby wyraźnie wskazać zakres możliwych urazów i uszkodzeń, które mogą być spowodowane nieprawidłowym użytkowaniem, informacje zostały opatrzone nagłówkiem "Ostrzeżenie" lub "Uwaga". Jedne i drugie są ważne dla bezpieczeństwa i należy ich przestrzegać.


 <b>Ostrzeżenie</b>	Sygnalizuje, że w wyniku niewłaściwego użycia może dojść do poważnych obrażeń lub śmierci.
 <b>Uwaga</b>	Sygnalizuje, że w wyniku niewłaściwego użytkowania może dojść do niewielkich obrażeń lub uszkodzenia mienia.


- Należy zwrócić uwagę na symbol przed każdym elementem dotyczący bezpieczeństwa.


 <b>Zabronione</b>	Absolutny zakaz
---	-----------------

Zabrania się używania fotela przez poniższe osoby	
 <b>Zabronione</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) z upośledzeniami fizycznymi, sensorycznymi lub neurologicznymi lub nieposiadające doświadczenia i zdrowego rozsądku, chyba że są one nadzorowane i poinstruowane w zakresie korzystania z urządzenia przez osoby odpowiedzialne za ich bezpieczeństwo. Dzieci muszą być nadzorowane, aby upewnić się, że nie bawią się urządzeniami.</li> <li>■ Pacjenci z osteoporozą.</li> <li>■ Pacjenci z chorobami serca lub posiadające elektroniczne urządzenia medyczne jak rozrusznik serca.</li> <li>■ Osoby, które mają gorączkę.</li> <li>■ Kobiety w ciąży lub kobiety w trakcie miesiączki.</li> <li>■ Pacjenci, którzy są ranni lub cierpią na chorobę skóry.</li> <li>■ Dzieci poniżej 14 roku życia lub osoby nie zrównoważone umysłowo bez nadzoru nie mogą korzystać z tego urządzenia.</li> <li>■ Osoby, którym lekarze zalecili odpoczynek lub którzy źle się czują.</li> <li>■ Osoby, których ciała są mokre, nie mogą używać tego produktu.</li> <li>■ Urządzenie ma podgrzewaną powierzchnię. Osoby niewrażliwe na ciepło muszą zachować ostrożność podczas korzystania z urządzenia.</li> <li>■ Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta/serwisanta, lub kogoś o podobnych uprawnieniach.</li> </ul>




## Środki ostrożności (muszą być przestrzegane)

Ważne uwagi co do bezpieczeństwa	
 <b>Ostrzeżenia</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Nie pozwalaj dzieciom dotykać ruchomych części tego fotela masującego.</li> <li>■ Używaj dobrze uziemionego zasilacza odpowiedniego dla tego produktu.</li> <li>■ Wyciągnij wtyczkę po użyciu lub przed czyszczeniem, aby uniknąć obrażeń lub uszkodzenia produktu.</li> <li>■ Obsługuj fotel masujący zgodnie z instrukcją obsługi.</li> <li>■ Nie używaj akcesoriów, które nie są zalecane.</li> <li>■ Nie używaj fotela masującego na zewnątrz.</li> <li>■ Przed rozpoczęciem użytkowania przeczytaj uważnie niniejszą instrukcję obsługi.</li> <li>■ Nigdy nie używaj tego produktu do innych celów niż wymienione w niniejszym dokumencie.</li> <li>■ Zaleca się każdorazowo 20 minut użytkowania.</li> <li>■ Nie używaj fotela, jeśli pokrywa lub skóra jest zepsuta lub uszkodzona.</li> <li>■ Nie upuszczaj niczego nad fotelem masującym.</li> <li>■ Nie zasypiaj podczas korzystania z fotela masującego.</li> <li>■ Nie używaj fotela masującego, jeśli jesteś nietrzeźwy lub źle się czujesz.</li> <li>■ Nie korzystaj z masażu w ciągu godziny po posiłku.</li> <li>■ Nie ustawiaj dużej siły masażu aby uniknąć obrażeń.</li> </ul>

Środki ostrożności	
 <b>Ostrzeżenia</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Sprawdź, czy napięcie jest zgodne ze specyfikacją tego produktu.</li> <li>■ Nigdy nie używaj mokrej ręki do wyciągania wtyczki.</li> <li>■ Nie wolno dopuścić do przedostania się wody do wnętrza tego produktu, aby uniknąć porażenia prądem lub uszkodzenia produktu.</li> <li>■ Nie ciągnij za przewód zasilający podczas podłączania lub odłączania. Nieostrożne obchodzenie się ze sprzętem jest zakazane.</li> <li>■ Nie uszkodz przewodu ani nie modyfikuj obwodu tego urządzenia.</li> <li>■ Używaj suchej ściereczki do czyszczenia elementów elektrycznych, takich jak wyłącznik I wtyczka.</li> <li>■ Nie siadaj na urządzeniu w stanie odcięcia zasilania, aby uniknąć obrażeń w przypadku nagłego powrotu napięcia.</li> <li>■ Zaprzestań korzystania z urządzenia, gdy działa ono nieprawidłowo i natychmiast skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem producenta.</li> <li>■ Zaprzestań używania tego produktu w przypadku pogorszenia się samopoczucia i skonsultuj się z lekarzem.</li> </ul>

Warunki przechowywania	
 <b>Ostrzeżenia</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Temperatura w pomieszczeniu : od 5°C do 40°C.</li> <li>■ Wilgotność względna od 20% do 80%, brak gazów powodujących korozję, dobrze wentylowane pomieszczenie.</li> </ul>




## Środki ostrożności (muszą być przestrzegane)

Serwis i konserwacja	
 Ostrzeżenia	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Ten produkt powinien być konserwowany wyłącznie przez centrum serwisowe wyznaczone przez producenta. Żaden użytkownik nie powinien go rozmontowywać ani konserwować bez pozwolenia.</li><li>■ Nie zapomnij wyłączyć głównego wyłącznika zasilania po zakończeniu użytkowania. Nie używaj produktu, jeśli gniazdo zasilania poluzuje się.</li><li>■ Jeśli produkt nie będzie używany przez dłuższy czas, należy zwinąć przewód zasilający produktu i przechowywać go w suchym i wolnym od kurzu miejscu.</li><li>■ Nie przechowywać produktu w wysokiej temperaturze lub w pobliżu otwartego ognia. Unikać długotrwałego wystawiania na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.</li><li>■ Produkt należy czyścić suchą szmatką. Nigdy nie używaj rozcieńczalnika, benzenu lub alkoholu.</li><li>■ Elementy mechaniczne tego produktu są specjalnie zaprojektowane i wyprodukowane, więc nie jest wymagana żadna specjalna konserwacja.</li><li>■ Nie używaj ostrych przedmiotów do klucia tego produktu.</li><li>■ Nie należy toczyć ani ciągnąć urządzenia po nierównym podłożu. Przed przemieszczeniem należy go podnieść.</li><li>■ Produkt powinien być używany w sposób przerywany. Nie używaj go w sposób ciągły przez dłuższy czas.</li></ul>
Środowisko użytkowania	
 Ostrzeżenia	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Nie używaj tego produktu w pomieszczeniach o bardzo wysokiej wilgotności, takich jak łazienka.</li><li>■ Należy natychmiast zaprzestać używania produktu w przypadku gwałtownej zmiany temperatury otoczenia.</li><li>■ Nie używaj tego produktu w środowisku silnie zapyłonym lub żrącym.</li><li>■ Nie używaj tego produktu na małej przestrzeni lub w miejscu bez dobrej wentylacji.</li></ul>
Rozwiązywanie zwykłych usterek	
 Ostrzeżenia	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Naturalnym jest odgłos pracujących siłowników w momencie używania fotela masującego.</li><li>■ Jeśli sterownik nie działa normalnie, należy sprawdzić, czy wtyczka i gniazdo zasilania są prawidłowo podłączone i czy włącznik zasilania jest włączony.</li><li>■ Jeśli znamionowy czas pracy dobiegnie końca, fotel automatycznie aktywuje przycisk wyłączania; Jeżeli fotel masujący używany jest bez przerwy przez długi czas, to w momencie osiągnięcia wysokiej temperatury nastąpi automatyczne wyłączenie. Należy odczekać co najmniej pół godziny, aby móc dalej korzystać z fotela masującego.</li></ul>

## Części montażowe

### Instrukcja montażu masażera łydek

1. Włóż przewody masażera łydek i rurę powietrzną do odpowiednich gniazd na przednim końcu stelaża (Rysunek 1).
2. Po zamontowaniu przewodu otwórz pokrywy mocujące masażer łydek po obu stronach stelaża (Rysunek 2).
3. Podnieś masażer do wycięcia, zamknij pokrywy mocujące i przytwierdź w miejscu za pomocą 2 śrub M4 (Rysunek 3).d cover the fixing cover and finally fix it in place with 2 M4 screws (Figure 3).

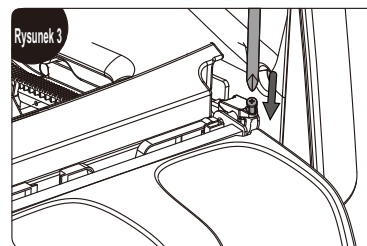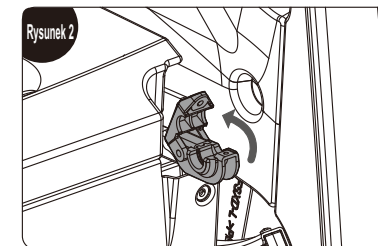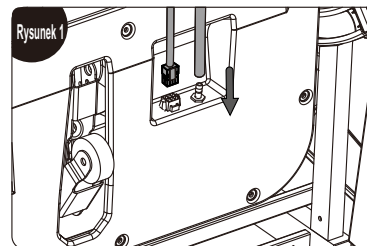


## Umieszczenie fotela masującego

### Miejsce montażu

**Upewnij się, że jest wystarczająco dużo miejsca, ponieważ fotel masujący potrzebuje do rozłożenia co najmniej 12 cm.**


Nie wystawiaj fotela masującego bezpośrednio na działanie wysokiej temperatury (np. przed urządzeniami grzewczymi) i promieni słonecznych; umieść go w miejscu, gdzie można uniknąć wysokiej temperatury i bezpośredniego działania promieni słonecznych. Zaleca się ułożenie miękkiej maty w przypadku długotrwałego użytkowania w wyznaczonym miejscu. Podczas układania takiej maty, jej rozmiar powinien być wystarczający do objęcia podstawy urządzenia. Miej na uwadze zakres, w którym urządzenie dotyka podłogi i miejsce, w którym stopy dotykają podłogi.

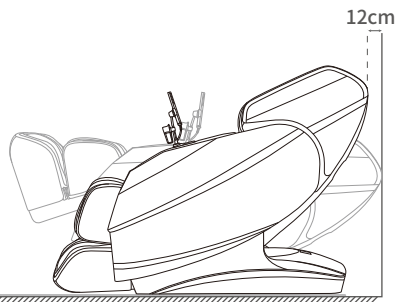

### Podnoszenie fotela

**Wymagana jest praca zespołowa przy podnoszeniu i przesuwniu fotela, aby uniknąć ryzyka obrażeń.**

1. Podnieś fotel masujący, aby przenieść go na delikatnym podłożu, np. na drewnianych podłogach.  
2. W przypadku przemieszczania urządzenia na drewnianej podłodze, zaleca się podniesienie go. Należy unikać uszkodzenia kółek. Gdy fotel jest podnoszony i przesuwany do wyznaczonej pozycji, należy uważać na ręce, aby uniknąć obrażeń, oraz uważać na przygnięcie stóp. Nie puszczaj urządzenia, dopóki korpus nie stanie całkowicie płasko na ziemi, podłoga może zostać uszkodzona, dlatego zaleca się umieszczenie na niej maty.

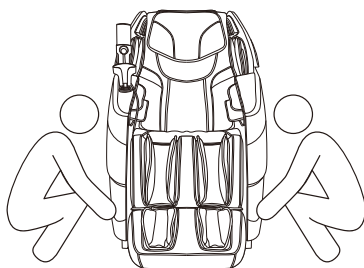


## Umieszczenie fotela masującego

### Metoda przemieszczania

**Użyj tylnych kółek do przesuwania fotela masującego. Przesuń fotel, przechylając go do tyłu do około 45°, jak pokazano na rysunku.**



**UWAGA: Nadmierna siła przy wychyleniu spowoduje całkowite przewrócenie się fotela i uszkodzenie urządzenia.**

1. Przed przemieszczeniem należy prawidłowo wyłączyć urządzenie, aby je zresetować i następnie odłączyć od zasilania.
2. Podczas przenoszenia na fotelu nie powinno nic leżeć. (Ludzie, zwierzęta domowe lub rzeczy).
3. Podczas przenoszenia nie należy upuszczać fotela z wysokości większej niż 2 mm ani przekraczać szczeliny większej niż 5 mm.
4. Podczas korzystania z kółek do przesunięcia urządzenia, pojedyncze pchnięcie nie jest zalecane; jeśli odległość przekracza 50 metrów, urządzenie należy przesuwać powoli i równomiernie.

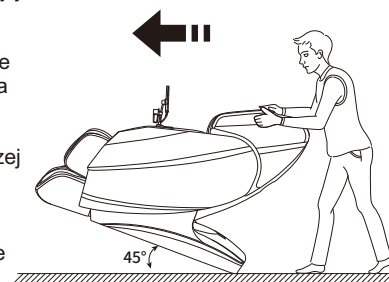

### Jak zdemontować poduszkę zagłówek i poduszkę na oparcie oraz jak z nich korzystać


Zastosowanie poduszki zagłówek może zmniejszyć intensywność masażu ugniatającego na szyi i ramionach. O zastosowaniu poduszki zagłówek można zdecydować w zależności od potrzeb (zaleca się jej zastosowanie). Poduszka oparcia i oparcie są połączone zamkiem błyskawicznym (1), poduszka zagłówek i poduszka oparcia są również połączone zamkiem błyskawicznym (2).

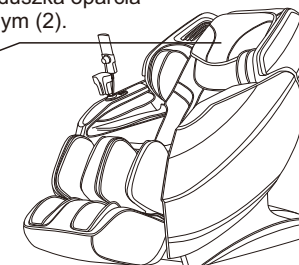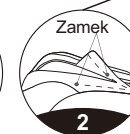

## Przed użyciem

### Sprawdzenie otoczenia

Upewnij się, że wokół urządzenia nie ma ludzi, zwierząt domowych i innych przedmiotów.

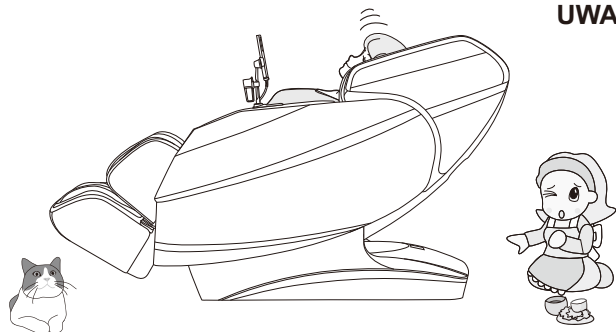


### Upewnij się, że w szczelinach urządzenia nie ma żadnych przedmiotów

Przed masażem upewnij się, że w podnóżku, przy stopach itp. nie znajdują się żadne obce przedmioty.

W żadnym wypadku nie wolno dopuścić, aby ręce, stopy i głowa zagłębiały się w obszar pomiędzy mechanizmem dolnej części podnóżka a korpusem głównym lub obszar pomiędzy podłokietnikiem a oparciem.


W żadnym wypadku nie wolno dopuścić, aby ręce, stopy lub głowa dostały się pod tkaninę lub skórę pokrywającą powierzchnię masażu.

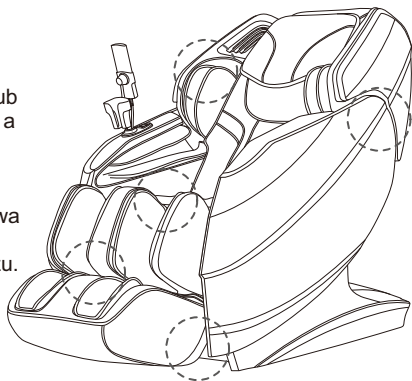


## Przed użyciem

### Włączanie zasilania


#### UWAGA

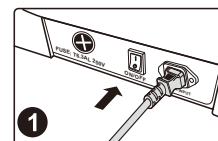

Podłączenie kabla zasilającego

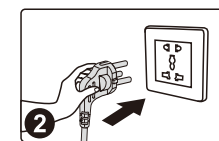

Schemat podłączenia zasilania

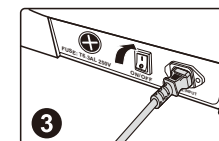


Włącz przełącznik zasilania (pozycja "I")

#### OSTRZEŻENIE

- Przed użyciem należy sprawdzić, czy przewód zasilający i wtyczka nie są uszkodzone.
- Zasilanie tego urządzenia należy dostarczać zgodnie z wymaganiami dotyczącymi mocy roboczej tego urządzenia.
- Surowo zabrania się używania zasilania innego niż nominalne zasilanie tego produktu.
- Surowo zabrania się podłączania różnych urządzeń do konwersji zasilania bez autoryzacji do zasilania tego produktu.

## Budowa urządzenia

### Opis poszczególnych elementów

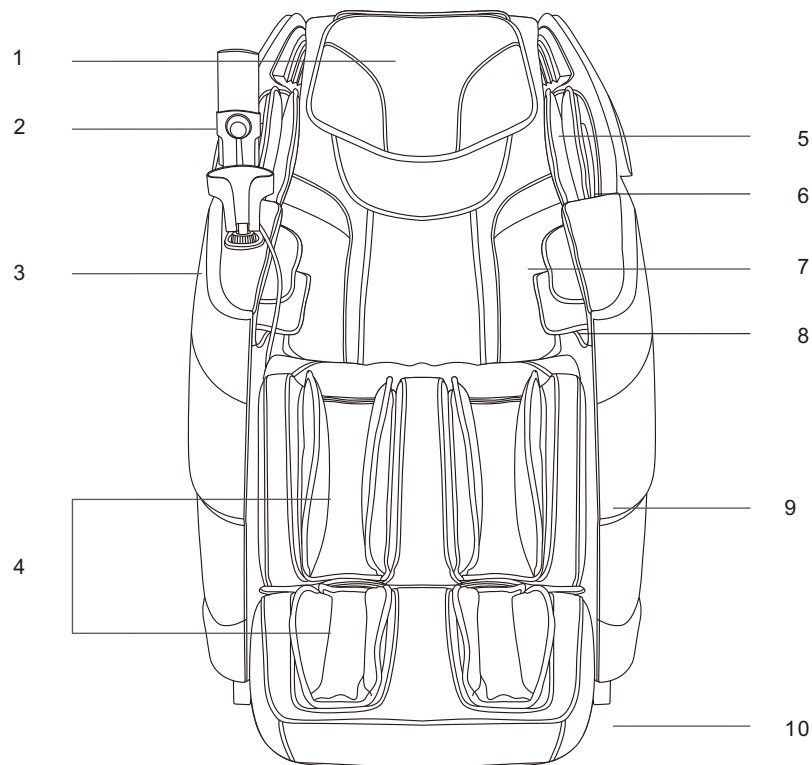


1. Poduszka za głowę
2. Pilot
3. Przyciski szybkiego dostępu w podłokietniku
4. Masażer nóg
5. Poduszka oparcia

6. Poduszka powietrzna przy ramionach
7. Mechanizm masujący ramiona
8. Poduszki powietrzne przedramion
9. Podłokietnik
10. Pokrywa boczna

## Budowa urządzenia

### Schemat rozkładu funkcji

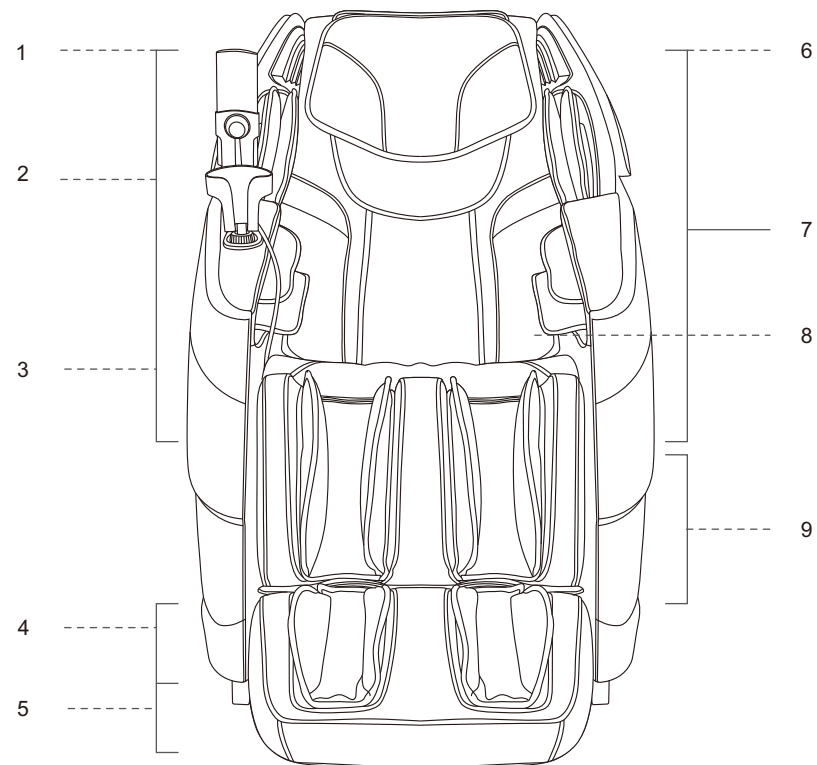

1. Ramiona:  
Masaż poduszkami powietrznymi
2. Przedramiona:  
Uchwyt na pilota  
Uchwyt na telefon  
Port ładowania USB
3. Dłonie:  
Masaż poduszkami powietrznymi
4. Nogi:  
Masaż poduszkami powietrznymi


5. Stopy:  
Masaż rolkowy
6. Po obu stronach głowy:  
odtworzenie dźwięku w 3D
7. Od głowy i szyi do pośladków:  
Masaż ramionami masującymi
8. Ogrzewanie pleców, talii i ramion:  
Funkcja ogrzewania
9. Nogi:  
Masaż poduszkami powietrznymi



## Budowa urządzenia

### Sposób użytkowania kołnierza do ogrzewania

- Fotel został wyposażony w unikalny kołnierz z innowacyjnymi funkcjami ogrzewania za pomocą grafenu ramion, pleców, talii i brzucha. Użytkownicy mogą umieścić kołnierz w różnych miejscach masażu, w zależności od potrzeb. Kiedy kołnierz jest umieszczony na ramionach, dzięki grafenowi będzie ogrzewał akupunkty, takie jak Bingfeng, Tianzong, Yunmen i Qihu wokół ramienia i obojczyka, skutecznie łagodząc objawy zapalenia stawu łopatkowo-ramiennego i kaszel, a także usuwając chłód i wilgoć ze stawów barkowych.
- Kiedy kołnierz zostanie umieszczony na brzuchu i plecach (podwójne zastosowanie), dzięki ogrzewaniu grafenowemu odgrywa on rolę w eliminowaniu chłodu i łagodzeniu bólu, rozgrzewaniu kanałów energii i usuwaniu zastoju przepływu krwi w plecach i brzuchu, rozprowadzaniu energii Qi i krwi po południku pleców i brzucha, łagodzi także dolegliwości związane z nieregularnymi miesiączkami i bólami menstruacyjnymi, łagodzi bóle w dolnej części pleców i zaburzenia pracy nerek, ogrzewa jelita i żołądek oraz usuwa chłód jelitowy, z korzystnym skutkiem dla niektórych osób z niedoborem Qi oraz niewydolnością śledziony i żołądka.

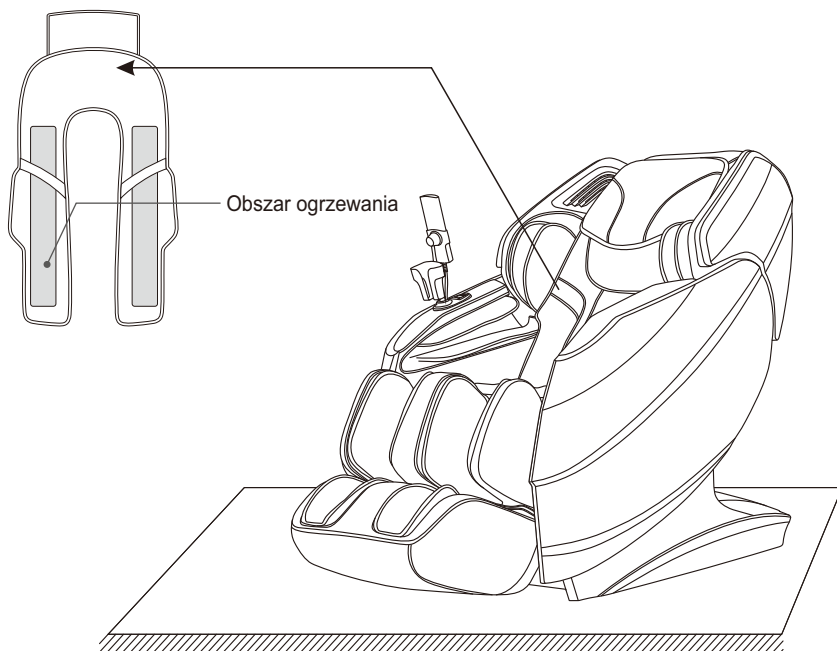

## Budowa urządzenia

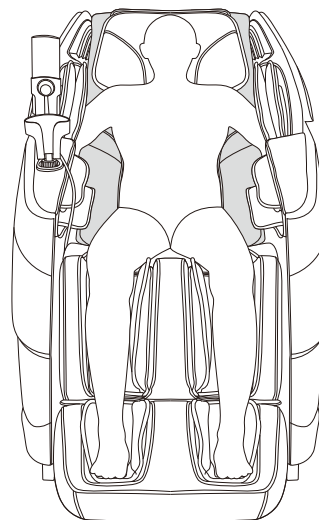


Diagram obrazujący zastosowanie na plecach i w talii


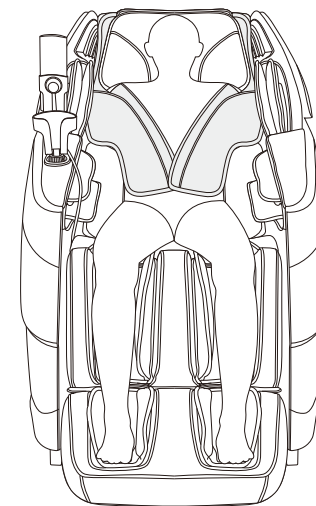


Diagram obrazujący zastosowanie na ramionach i brzuchu



## Budowa urządzenia

### I. Instrukcja obsługi pilota

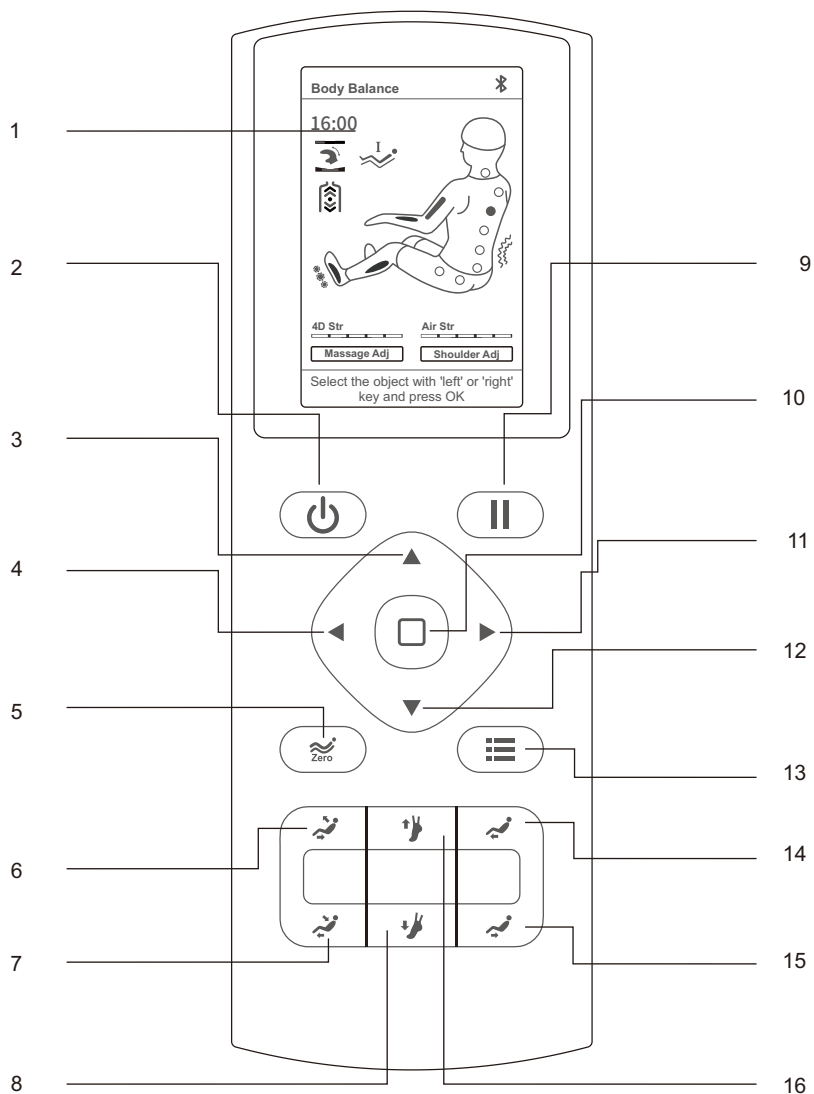


## Budowa urządzenia

1. Wyświetlacz
2. Przycisk włączania/wyłączania  
·Włącz lub wyłącz fotel masujący.
3. Przycisk w górę  
·Przycisk do nawigacji w górę. Możesz nacisnąć ten przycisk, aby przewinąć w górę, aby wybrać element menu lub regulować zwiększenie.
4. Przycisk w lewo  
·Klucz do nawigacji w lewo. Możesz nacisnąć ten klawisz, aby przewinąć w lewo, aby wybrać element lub powrócić do poprzedniego menu.
5. Przycisk Zero Gravity  
·Ustawia kąt Zero Gravity na "Zero Gravity I", "Zero Gravity II", "Zero Gravity III" lub "wyłączony".
6. Przycisk podnoszenia fotela do pozycji siedzącej  
·Podnosi fotel masujący.
7. Przycisk rozkładania fotela do pozycji leżącej  
·Rozkładanie fotela do pozycji leżącej.
8. Przycisk wysunięcia masażera nóg  
·Zwiększanie wysunięcia masażera nóg.
9. Przycisk pauzy  
·Wstrzymanie masażu lub wyjście z pauzy - uruchomienie masażu.
10. Przycisk OK  
·Potwierdza lub anuluje wybór funkcji masażu.
11. Przycisk w prawo  
·Przycisk do nawigacji w prawo. Możesz nacisnąć ten przycisk, aby przewijać w prawo, aby wybrać pozycję lub przejść do następnego menu.
12. Przycisk w dół  
·Przycisk do nawigacji w dół. Możesz nacisnąć ten przycisk, aby przewinąć w dół, aby wybrać element menu lub regulować zmniejszanie.
13. Przycisk menu  
Przenosi do interfejsu menu głównego.
14. Przycisk do podnoszenia masażera nóg  
·Podnosi masażer nóg.
15. Przycisk opuszczania mechanizmu nóg  
·Opuszcza masażer nóg.
16. Przycisk zmniejszania wysunięcia masażera nóg  
·Skracanie wysunięcia masażera nóg.

## Budowa urządzenia

### II. Opis panelu podręcznego podłokietnika

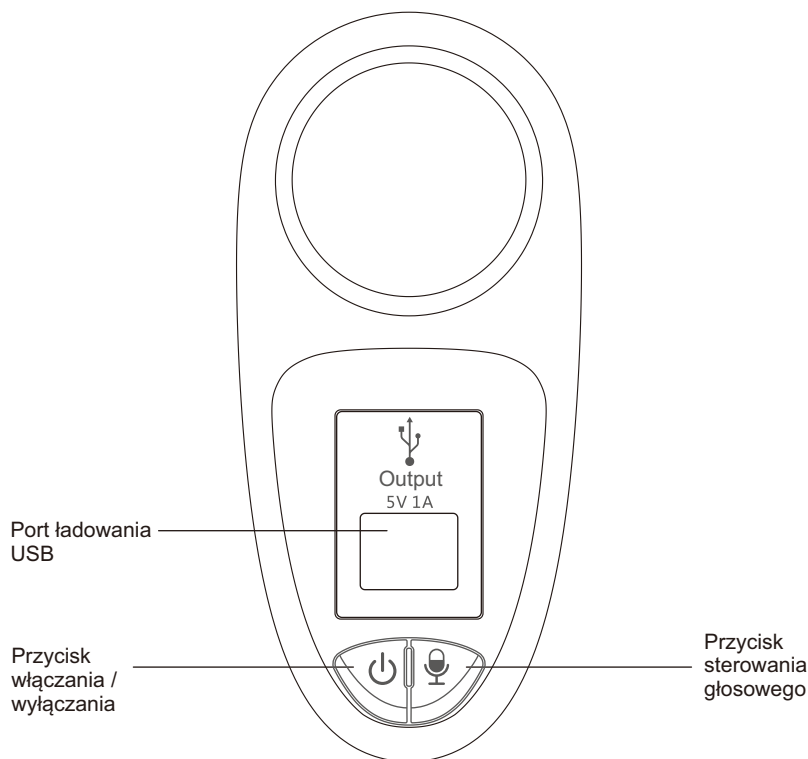

Port ładowania USB

Ładuje telefony komórkowe lub inne urządzenia elektroniczne.

Przycisk włączania / wyłączenia


Długotrwałe przyciśnięcie tego przycisku włącza lub wyłącza fotel masujący, krótkie przyciśnięcie wstrzymuje lub kończy masaż.

Przycisk sterowania głosowego

Długotrwałe przyciśnięcie tego przycisku włącza lub wyłącza funkcję asystanta głosowego, krótkie przyciśnięcie może aktywować asystanta.


## Instrukcja obsługi

1. Naciśnij przycisk Wł./ Wył. na pilocie lub naciśnij i przytrzymaj przycisk Wł./ Wył. na prawym podłokietniku, aby włączyć fotel.
2. Poczekać na wybór programu automatycznego. Wybierz program automatyczny za pomocą pilota lub komend głosowych. Jeśli fotel nie będzie używany przez ponad 20 minut, zostanie automatycznie wyłączony.
3. Automatyczna regulacja nachylenia: Po wybraniu programu automatycznego fotel masujący automatycznie ustawi się w pozycji zero gravity. Można poczekać na zakończenie regulacji lub nacisnąć przycisk OK, aby przejść do następnego kroku.

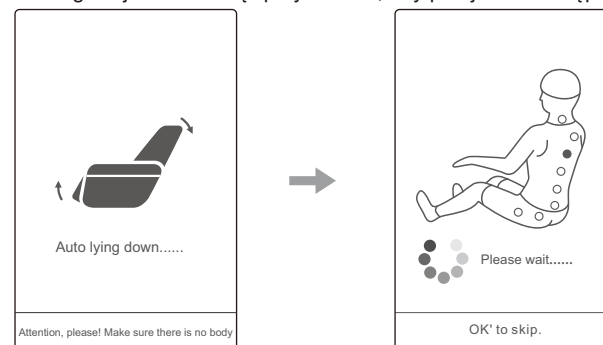

Schemat dostosowywania nachylenia      Schemat wykrywania kształtu ciała

4. Można poczekać na zakończenie wykrywania kształtu ciała lub nacisnąć przycisk OK, aby pominąć wykrywanie i rozpocząć masaż.
5. Precyzyjna regulacja pozycji ramion masujących: Po zakończeniu skanowania kształtu ciała, pilot lub komunikat głosowy poprosi użytkownika o precyzyjne dostosowanie pozycji ramion. Jeśli rolki masujące po prostu zatrzymują się na ramionach, regulacja ta nie jest potrzebna i można ją pominąć i rozpocząć masaż poprzez naciśnięcie przycisku OK. W przeciwnym razie należy dostosować pozycję ramion masujących za pomocą przycisków w górę i w dół, a następnie nacisnąć przycisk OK, aby rozpocząć masaż. Jeśli w ciągu 20 sekund nie zostanie wykonana żadna operacja, domyślnie zostanie ustawiona bieżąca pozycja ramion masujących i rozpocznie się masaż.

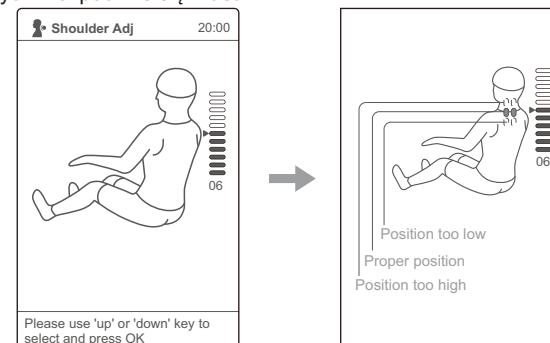


## Instrukcja obsługi

### IV. Przycisk pauzy (możesz używać tej funkcji po włączeniu fotela)

Po włączeniu fotela masującego naciśnij przycisk pauzy lub włączania / wyłączenia na podłokietniku, aby wejść w stan wstrzymania. Wszystkie funkcje masażu zostaną zarzymane, Naciśnij ponownie przycisk pauzy lub przycisk włączania / wyłączenia na podłokietniku, aby wznowić masaż.

Uwaga: W trybie pauzy nie działają żadne funkcje oprócz wyłączenia.

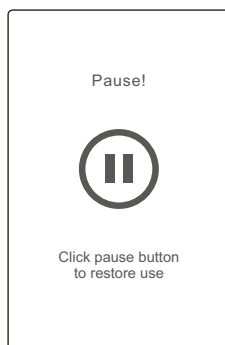


Schemat stanu pauzy

### V. Program automatyczny (używaj tej funkcji dopiero po włączeniu urządzenia)

1. Wybór programu automatycznego


(1) Naciśnij przycisk Menu na pilocie, aby otworzyć menu główne.

(2) Wybierz opcję programu automatycznego i wciśnij OK, by otworzyć interfejs programów automatycznych.

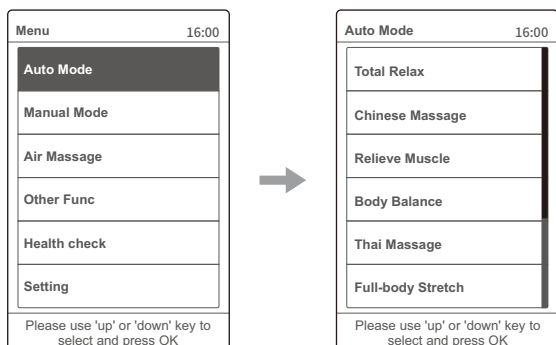

## Instrukcja obsługi

(3) Wybierz żądany program automatyczny i naciśnij przycisk OK aby rozpocząć masaż.

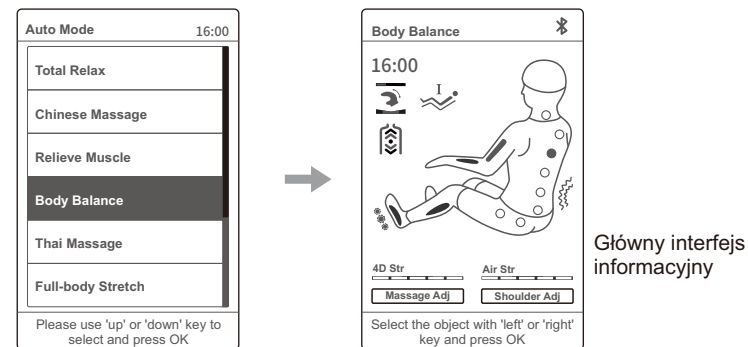

Główny interfejs informacyjny

### 2. Wprowadzenie do programów automatycznych

Funkcja	Opis
Total Relax	Dzięki ruchom masażera 3D wzdłuż prowadnicy i-open oraz odchyleniu oparcia fotela do pozycji flat, uzyskujemy efekt rozciągania. Masaż w tej pozycji skutecznie łagodzi ból mięśni lędźwiowych i eliminuje zmęczenie, złagodzić stres ciała i umysłu. Uwaga: podczas masażu słyszymy muzykę w tle, którą można włączyć lub wyłączyć za pomocą opcji komunikatów głosowych w ustawieniach.
Chinese Massage	Głównie poprzez zastosowanie technik masażu tradycyjnej medycyny chińskiej oraz masaż 3D pleców i talii masaż pobudza krążenie krwi w plecach i talii, koi meridiany i złagodzi blokady pleców i talii. Jest odpowiedni dla osób cierpiących na ból pleców i talii oraz z nadwyrażonymi mięśniami odcinka lędźwiowego. Intensywność masażu jest delikatna. Uwaga: podczas masażu słyszymy muzykę w tle, którą można włączyć lub wyłączyć za pomocą opcji komunikatów głosowych w ustawieniach.
Relieve Muscle	Masaż poprzez nacisk na szyję, plecy i talię, pośladki i nogi za pomocą technik ugniatań, oklepywania i uciskania palcami, głównie w celu złagodzenia zmęczenia ciała i umożliwienia mu lepszego relaksu. Uwaga: podczas masażu słyszymy muzykę w tle, którą można włączyć lub wyłączyć za pomocą opcji komunikatów głosowych w ustawieniach.
Body Balance	Masaż poduszkami powietrznymi z wykorzystaniem techniki ugniatań i ucisku, tak aby pobudzić krążenie krwi, złagodzić ból w różnych częściach ciała i głęboko złagodzić zmęczenie mięśni.
Thai Massage	Mainly use calf and backrest electric push rod to clamp legs, hands and shoulders with the aid of air massage, and then apply stretching massage, while the movement holds against the back and waist for 4D medical massage, so that the body is in the Thai stretching state. It is suitable for people under high stress to improve their head-down on chest and humpback. Massage intensity is strong.

## Instrukcja obsługi

Full-body Stretch	Rozciąganie całego ciała poprzez zastosowanie techniki ugniatania, oklepywania, ugniatania palców i masażu leczniczego oraz za pomocą masażu poduszkami powietrznymi nóg, dłoni i ramion. Masaż rozciągający, który koi meridiany, pobudza krążenie krwi, rozluźnia blokady w organizmie.
Neck & Shoulder Care	Masaż szyi i ramion głównie za pomocą technik ugniatania i rozciągania, oraz górnej części pleców za pomocą masażu leczniczego i akupunktury Jianjing. Łagodzi spondylozę szyjną i pomaga uzyskać efekt rozluźnienia mięśni szyi i ramion. Intensywność masażu jest delikatna, odpowiednia dla osób pracujących w biurze i cierpiących na zmęczenie odcinka szyjnego.
Spine Traction	Masuje talię głównie poprzez ugniatanie, oklepywanie i masaż leczniczy. Ramiona masażera pracują wzdłuż linii kręgosłupa i talii poprzez masaż 3D, w celu złagodzenia bólu odcinka lędźwiowego kręgosłupa. W połączeniu z ogrzewaniem wokół talii, utrzymuje komfortową temperaturę, co poprawia działanie masażu. Delikatna i umiarkowana intensywność masażu wraz z ogrzewaniem.
Leg&foot Relieve	Masaż ramion i talii głównie poprzez ugniatanie, oklepywanie oraz połączenie tych technik. Dodatkowo poprzez masaż poduszkami powietrznymi nóg i stóp pozwala na bardziej kojący masaż nóg i stóp. Odpowiedni dla osób prowadzących siedzący tryb życia, z niewielkim obciążeniem nóg i stóp. Łagodzi bóle w okolicach odcinka szyjnego oraz lędźwiowego kręgosłupa, u osób prowadzących siedzący tryb życia, oraz przynosi ulgę i odprężenie dla nóg i stóp. Intensywność masażu jest delikatna.
Superior Enjoyable	Masaż poduszkami powietrznymi całego ciała w połączeniu z masażem rolkowym stóp i masażem ugniatającym łydek. Odpowiedni dla osób starszych i osób cierpiących na obciążenie pleców. Intensywność masażu jest delikatna.
President Cosy	Masaż ramion, szyi, pleców i talii, głównie poprzez ugniatanie, oklepywanie, oraz poprzez łączenie obu technik. Łagodzi zmęczenie, pobudza krążenie krwi i uwolnia od stresu poprzez głęboki masaż. Intensywność masażu jest umiarkowana.
Keep Fit	Masaż ramion, szyi, talii i bioder za pomocą technik ugniatania i ugniatania palcami. Masaż całego ciała, aby zrelaksować ciało i umysł i cieszyć się przyjemnością na najwyższym poziomie. Intensywność masażu jest delikatna.


## Instrukcja obsługi

Office Regimen	Masaż ramion, szyi i talii, głównie za pomocą technik ugniatania, oklepywania, oraz łączenia obu technik. Łagodzi napięcia ramion i szyi, a także zmniejsza bolesność mięśni w odcinku lędźwiowym kręgosłupa poprzez głęboki masaż. Odpowiedni dla osób pracujących umysłowo i prowadzących siedzący tryb życia.
Health Recharge	Głęboki masaż całego ciała za pomocą ugniatania, oklepywania i technik Shiatsu. Pobudza krążenie krwi w całym ciele i zapobiega tworzeniu się skrzepów krwi. Jest odpowiedni dla osób, które spędzają dużo czasu w domu i nie lubią wychodzić. Intensywność masażu jest umiarkowanie delikatna.
Energy Boost	Głęboki masaż całego ciała za pomocą ugniatania, oklepywania i technik Shiatsu. Ma na celu wzmocnić siły witalne i pobudzić energię.
Lunch Break	Masaż pleców i talii za pomocą technik ugniatania i oklepywania, a następnie uciskania punktów akupunktury Shenyu. Zastryk energii na kolejną połowę dnia pracy.
Back Spa	Głęboki masaż całego ciała, poprzez nacisk na punkty akupunkturowe za pomocą ugniatania, oklepywania, ugniatania palcami i innymi technikami masażu, aby stymulacja w pełni dotarła do głębokiej warstwy tkanki mięśniowej, wywołała miejscowe uczucie ciepła w połączeniu (z funkcją ogrzewania) i wyregulowała Qi i krew w dążeniu do uzyskania efektu ciepła i wydalania wilgoci. (Uwaga: masaż całego ciała połączony z ogrzewaniem)
Sweet Dream	Masaż ramion, szyi, pleców i talii za pomocą technik ugniatania, masażu leczniczego oraz poprzez nacisk na punkty akupunkturowe Fengchi i Shenyu. Ma na celu pomóc w zasypianiu i poprawić jakość snu.

## Instrukcja obsługi

### VI. Program dopasowany do Użytkownika (możesz korzystać z tej funkcji po włączeniu fotela)

1. Tryb masażu: jak pokazano na poniższym rysunku, otwórz menu, aby wybrać rodzaj masażu.

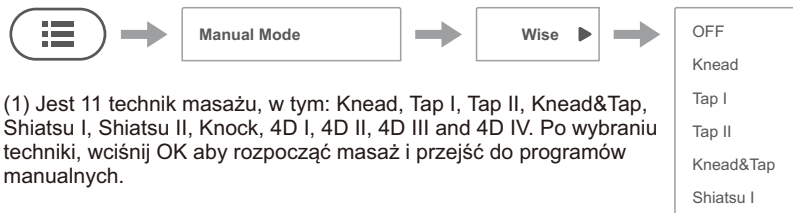


(1) Jest 11 technik masażu, w tym: Knead, Tap I, Tap II, Knead&Tap, Shiatsu I, Shiatsu II, Knock, 4D I, 4D II, 4D III and 4D IV. Po wybraniu techniki, wciśnij OK aby rozpocząć masaż i przejść do programów manualnych.

(2) Wyświetlanie techniki masażu na wyświetlaczu.

Funkcja	Regulacja masażera	
OFF	Naciśnij ten przycisk, aby masować bez żadnej techniki.	
Knead	Możesz regulować szybkość i siłę.	
Tap I	Możesz regulować szybkość, szerokość i siłę.	
Tap II	Możesz regulować szybkość, szerokość i siłę.	
Knead&Tap	Możesz regulować szybkość i siłę.	
Shiatsu I	Możesz regulować szybkość, szerokość i siłę.	
Shiatsu II	Możesz regulować szybkość, szerokość i siłę.	
Knock	Możesz regulować szybkość i siłę.	
4D I <b>4D</b>	Możesz regulować szybkość i siłę.	
4D II <b>4D</b>	Możesz regulować szybkość i siłę.	
4D III <b>4D</b>	Możesz regulować szybkość, szerokość i siłę.	
4D IV <b>4D</b>	Możesz regulować szybkość, szerokość i siłę.	

## Instrukcja obsługi

2. Obszar masażu: Jak pokazano na poniższym rysunku, otwórz menu, wybierz Area- Obszar, aby wybrać obszar masażu.

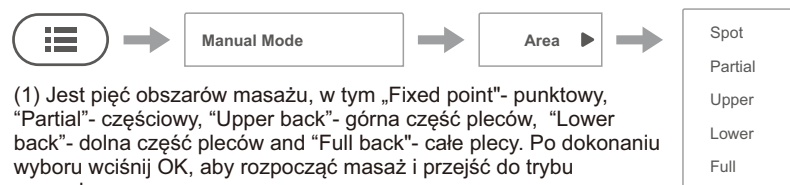


(1) Jest pięć obszarów masażu, w tym „Fixed point”- punktowy, „Partial”- częściowy, „Upper back”- górna część pleców, „Lower back”- dolna część pleców and „Full back”- całe plecy. Po dokonaniu wyboru wciśnij OK, aby rozpocząć masaż i przejść do trybu manualnego.

(2) Widok wyświetlacza- obszaru masażu.


Funkcja	Opis	
Point	Masaż punktowy w jednej stałej pozycji.	Możesz dostosować masowany obszar za pomocą przycisków UP-w górę i DOWN-w dół na wyświetlaczu.
Partial	Masaż częściowy(odcinkowy) o małym zakresie tam i z powrotem.	
Upper	Upper Masaż górnej części pleców tam i z powrotem.	
Lower	Lower Masaż dolnej części pleców tam i z powrotem.	
Full	Full Masaż całych pleców tam i z powrotem.	

3. Szerokość masażu: jak pokazano na poniższym rysunku, otwórz menu, wybierz Width-szerokość, aby dostosować szerokość masażu.

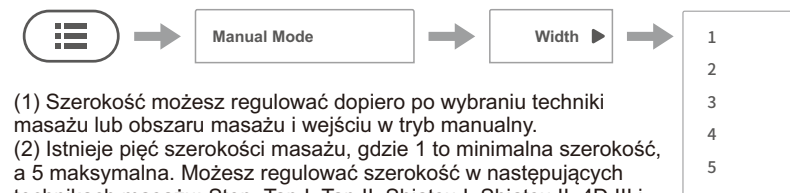


(1) Szerokość możesz regulować dopiero po wybraniu techniki masażu lub obszaru masażu i wejściu w tryb manualny.  
 (2) Istnieje pięć szerokości masażu, gdzie 1 to minimalna szerokość, a 5 maksymalna. Możesz regulować szerokość w następujących technikach masażu: Stop, Tap I, Tap II, Shiatsu I, Shiatsu II, 4D III i 4D IV.

(3) Widok wyświetlacza- szerokość masażu.

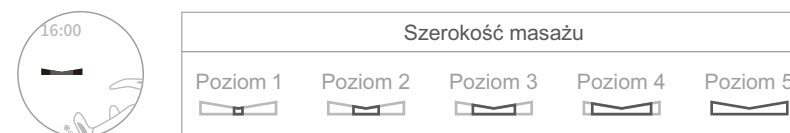


## Instrukcja obsługi

4. Szybkość masażu: jak pokazano na poniższym rysunku, otwórz menu, wybierz Speed-szybkość, aby dostosować szybkość masażu.

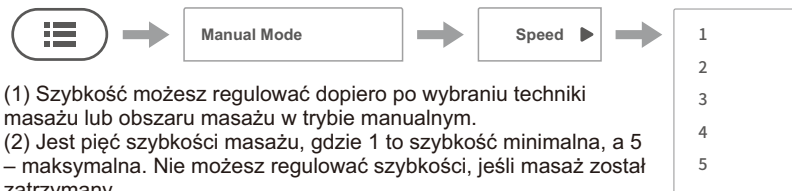


- (1) Szybkość możesz regulować dopiero po wybraniu techniki masażu lub obszaru masażu w trybie manualnym.
- (2) Jest pięć szybkości masażu, gdzie 1 to szybkość minimalna, a 5 – maksymalna. Nie możesz regulować szybkości, jeśli masaż został zatrzymany.
- (3) Widok wyświetlacza- szybkość masażu.

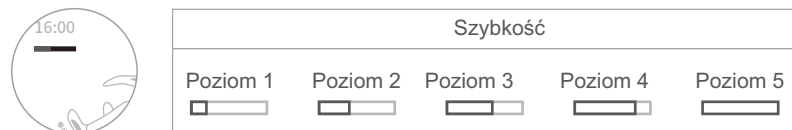


## VII. Program manualny (możesz korzystać z tej funkcji po włączeniu fotela)

1. Masaż poduszkami powietrznymi

(1) Wybór masażu poduszkami powietrznymi. Jak pokazano na poniższym rysunku, otwórz menu, wybierz Air Massage (masaż poduszkami powietrznymi) aby rozpocząć masaż uciskowy poduszkami powietrznymi. Są trzy strefy masażu poduszkami powietrznymi: Upper Body (górne partie ciała) Lower Body (dolne partie ciała) Whole Body (Całe ciało). Zarówno górne, jak i dolne części ciała są masowane uciskowo w tym samym czasie. Jeśli wybierzesz Off wyłączysz masaż.

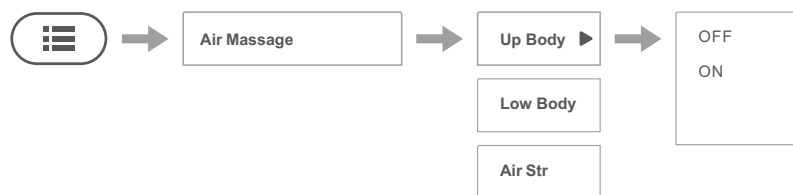

(2) Regulacja intensywności. Po włączeniu masażu poduszkami powietrznymi możesz regulować ciśnienie powietrza w poduszkach tzw. intensywność. Jest pięć poziomów intensywności, gdzie 1 to najniższy poziom, a 5 – najwyższy.

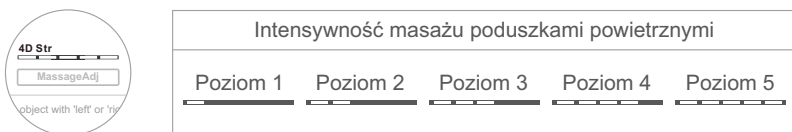

## Instrukcja obsługi

(3) Widok wyświetlacza- intensywność poduszek powietrznych.



2. Ogrzewanie

(1) Włączanie ogrzewania: jak pokazano na poniższym rysunku, otwórz menu, wybierz Other Func -> BACK heat (ogrzewanie pleców) aby włączyć/wyłączyć ogrzewanie pleców.



(2) Widok wyświetlacza- ogrzewanie




3. Masaż rolkowy stóp

(1) Włączanie masażu rolkowego stóp: jak pokazano na poniższym rysunku, otwórz menu, wybierz Other Func-> Roll (rolki) aby włączyć lub wyłączyć rolki masujące stopy.



(2) Widok wyświetlacza- masaż rolkowy stóp

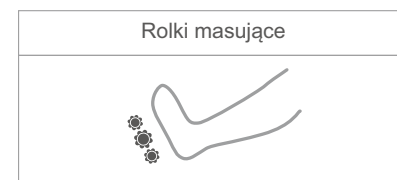


## Instrukcja obsługi

### VIII. Regulacja intensywności masażu 4D (możesz korzystać z tej funkcji po włączeniu fotela)


#### 1. Regulacja intensywności 4D

Jak pokazano na poniższym rysunku, otwórz menu, wybierz Massage Adj przejdź do 4D Str (regulacji intensywności 4D), aby dostosować intensywność 4D. Istnieje pięć poziomów intensywności 4D, gdzie poziom 1 oznacza intensywność minimalną, a poziom 5 – maksymalną. Im większa intensywność 4D, tym ramiona masujące są bardziej wypchnięte i tym większa jest intensywność masażu. (Na ekranie głównym pilota)

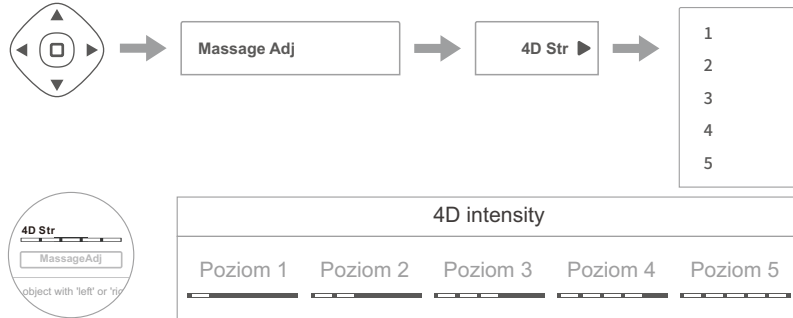

#### 3. Regulacja czasu

Jak pokazano na poniższym rysunku, otwórz menu, wybierz Massage Adj, przejdź do Time Adj aby wydłużyć lub skrócić czas masażu. Zakres regulacji wynosi 0–40 minut. Po zakończeniu masażu, fotel masujący wyłączy się automatycznie, ramiona masujące powrócą do pozycji wyjściowej, przy czym pozycja fotela masującego pozostanie niezmienną.

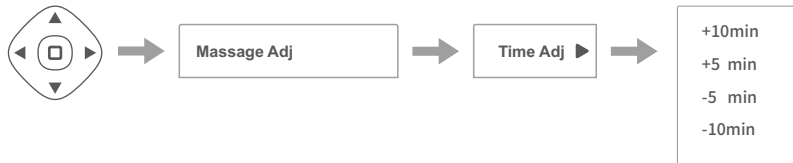

#### 4. Regulacja pozycji ramion

Jak pokazano na poniższym rysunku, otwórz menu, wybierz Shoulder Adj (pozycja ramion), aby precyzyjnie wyregulować pozycję ramion w górę lub w dół. Jeśli czujesz, że ramiona masażera nbie przylegają dokładnie do kształtu twoich pleców, możesz dostosować ich pozycję ręcznie.



## Instrukcja obsługi

### IX. Regulacja pozycji rozłożenia fotela (możesz korzystać z tej funkcji po włączeniu fotela)

#### 1. Zero-gravity

Są trzy poziomy odpowiadające trzem ustawionym kątom fotela masującego. Możesz nacisnąć przycisk Zero-gravity aby wielokrotnie przełączać się pomiędzy trzema poziomami Zero-gravity lub wyłączyć tę pozycję.

Widok wyświetlacza - Zero-gravity			
Zero-gravity I 	Zero-gravity II 	Zero-gravity III 	Off- nie widać ikony Zero-gravity na wyświetlaczu

#### 2. Pozycja fotela- całe ciało

- Naciśnij i przytrzymaj przycisk rozkładania fotela na pilocie, aby rozpocząć regulację fotela masującego w dół, oparcie opadnie, masażer nóg uniesie się, a regulacja zakończy się po zwolnieniu przycisku; regulacja zatrzyma się i będzie słyszalny dźwięk „bi-bi-bi”, gdy oparcie rozłoży się maksymalnie. Po zakończeniu rozkładania, mechanizm masażera nóg, automatycznie wykryje długość stopy.
- Naciśnij i przytrzymaj przycisk podnoszenia fotela na pilocie, aby rozpocząć regulację fotela masującego w górę, oparcie podniesie się, a masażer nóg opuści, a regulacja zakończy się po zwolnieniu przycisku; regulacja zatrzyma się i będzie słyszalny dźwięk „bi-bi-bi”, gdy oparcie wróci do pozycji wyjściowej. Po zakończeniu podnoszenia w górę mechanizm masażera nóg automatycznie wykryje długość stopy.

Pozycja fotela- całe ciało	
Seat-down- Rozkładanie fotela 	Seat-up- Rozkładanie fotela 

#### 3. Regulacja odchylenia podnóżka

- Naciśnij i przytrzymaj przycisk opuszczania podnóżka, aby opuścić nogi w dół, a regulacja zakończy się po zwolnieniu przycisku; regulacja zostanie zatrzymana i będzie słyszalny dźwięk „bi-bi-bi”, gdy podnóżek powróci do pozycji wyjściowej. Po opuszczeniu podnóżka, mechanizm masażera nóg automatycznie wykryje długość stopy.
- Naciśnij i przytrzymaj przycisk podniesienia podnóżka na pilocie, aby unieść masażer nóg w górę, regulacja zakończy się po zwolnieniu przycisku; regulacja zostanie zatrzymana i będzie słyszalny dźwięk „bi-bi-bi”, gdy podnóżek zostanie uniesiony maksymalnie. Po podniesieniu podnóżka mechanizm masażera nóg automatycznie wykryje długość stopy.

Regulacja odchylenia podnóżka	
Opuszczanie podnóżka 	Podnoszenie podnóżka 




## Instrukcja obsługi

### 4. Długość podnóżka

Naciśnij i przytrzymaj przycisk wysuwania mechanizmu podnóżka, zwolnij przycisk, aby zatrzymać regulację.

Naciśnij i przytrzymaj przycisk skracania mechanizmu podnóżka na pilocie, aby skrócić podnóżek i zwolnij przycisk, aby zatrzymać regulację.


Gdy regulacja osiągnie pozycję graniczną- zostanie zatrzymana i rozlegnie się sygnał dźwiękowy.

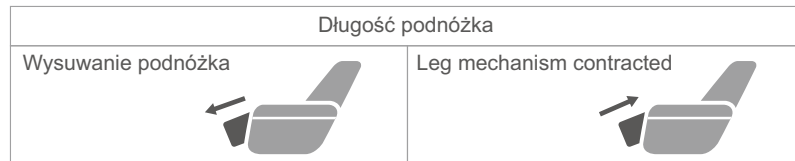

### X. Ulubione (możesz korzystać z tej funkcji po włączeniu fotela)

Jak pokazano na poniższym rysunku, otwórz interfejs menu Moje ulubione. Wybierz opcję „+” i naciśnij przycisk OK, aby dodać aktualnie uruchomiony program masażu do Moich ulubionych. Następnym razem, gdy będziesz chciał uruchomić ten program masażu, w interfejsie Moje ulubione możesz po prostu wybrać program, który został dodany do Moich ulubionych i nacisnąć przycisk OK. Ten sam program masażu nie może być wielokrotnie dodawany i można zapisać maksymalnie 3 programy masażu.

Możesz wybrać na pilocie ulubiony program, a następnie nacisnąć i przytrzymać przycisk OK, by usunąć ulubiony program.

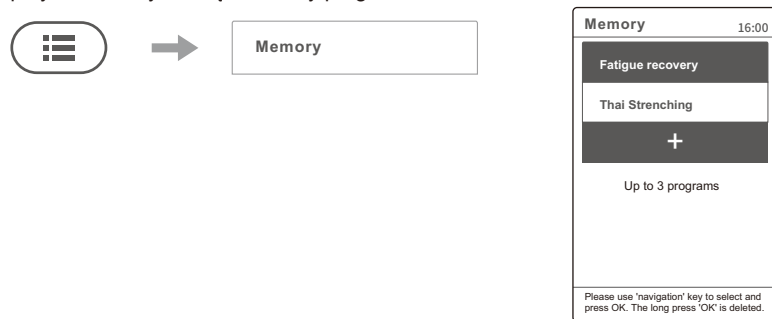

### XI. Ustawienia systemowe (możesz korzystać z tej funkcji po włączeniu fotela)

1. Bluetooth: jak pokazano na poniższym rysunku, otwórz menu ustawień Bluetooth, aby włączyć lub wyłączyć funkcję głośnika Bluetooth. Po włączeniu funkcji głośnika Bluetooth można odtwarzać muzykę, łącząc się ze swoim urządzeniem (telefonem komórkowym, tabletem itp.). Metoda połączenia jest następująca:

(1) Włącz funkcję Bluetooth swojego urządzenia, wyszukaj nazwę Bluetooth ze słowami „IMCM-XXXXXX” i połącz.

(2) Otwórz odtwarzacz muzyki na swoim urządzeniu, aby odtwarzać muzykę.



## Instrukcja obsługi

2. Asystent głosowy: jak pokazano na poniższym rysunku, otwórz menu ustawień asystenta głosowego, aby włączyć lub wyłączyć funkcję asystenta głosowego lub naciśnij i przytrzymaj klawisz głosowy na prawym podłokietniku, aby włączyć lub wyłączyć funkcję asystenta głosowego. Po włączeniu asystenta głosowego można za pomocą funkcji asystenta głosowego sterować fotelem masującym. Sposób działania jest następujący:



(1) Wydadaj komunikat "Hi Alice" lub "Hey Alice" w kierunku głośnika lub naciśnij przycisk sterowania głosowego na prawym podłokietniku, aby aktywować funkcję sterowania głosem. Po pomyślnym włączeniu tej funkcji fotel do masażu odpowie "I am here".

(2) Gdy funkcja sterowania głosem jest włączona, wypowiadaj kolejne komendy w ciągu 6 sekund aby zarządzać dalszymi funkcjami fotela. Po otrzymaniu odpowiedzi z fotela masującego, możesz wypowiadać kolejne polecenia. Aby funkcja sterowania głosem była aktywna, pamiętaj o zachowaniu maksymalnie sześciu sekund odstępu pomiędzy komendami głosowymi, w przeciwnym razie funkcję tę trzeba będzie ponownie aktywować.

Komendy sterowania głosowego w języku angielskim:

Włączenie funkcji sterowania głosem		
Komenda: "Hi Alice" lub "Hey Alice". Odpowiedź: "I am here" (Jestem tu)		
No.	Komendy sterowania głosowego	Odpowiedź fotela
1	Massage on	Odpowiedź: Ok, Massage on
2	Massage close	Odpowiedź: Ok, Massage close
3	Total Relax	Odpowiedź: Ok, Total Relax
4	Energy Boost	Odpowiedź: Ok, Energy Boost
5	Sweet Dream	Odpowiedź: Ok, Sweet Dream
6	Neck & Shoulder Care	Odpowiedź: Ok, Neck & Shoulder Care
7	Lunch Break	Odpowiedź: Ok, Lunch Break
8	Thai Massage	Odpowiedź: Ok, Thai Massage
9	Open the air pressure	Odpowiedź: Ok, Open the air pressure
10	Close the air pressure	Odpowiedź: Ok, Close the air pressure
11	Up the seat position	Odpowiedź: Ok, Up the seat position
12	Down the seat position	Odpowiedź: Ok, Down the seat position
13	Change the other mode	Odpowiedź: Ok, Change the other mode
14	Go little down	Odpowiedź: Ok, Go little down
15	Go little up	Odpowiedź: Ok, Go little up

Uwaga: polecenia 14 i 15 mogą być używane tylko po poleceniu 13.

## Instrukcja obsługi

3. Komunikat głosowy: jak pokazano na poniższym rysunku, wejdź do menu ustawień komunikatu głosowego, aby włączyć lub wyłączyć komunikat głosowy i muzykę w tle.

(1) Komunikat głosowy: Podczas korzystania z fotela masującego użytkownik zostanie poinstruowany, jak prawidłowo korzystać z fotela masującego, pomagając nowym użytkownikom szybciej zapoznać się z funkcją masażu.

(2) Muzyka w tle: Cztery automatyczne programy "Total Relax", "Chinese Massage", "Relieve Muscle" i "Sweet Dream" odtwarzają muzykę w tle.



4. Głośność: jak pokazano na poniższym rysunku, możesz otworzyć menu ustawień głośności, aby ustawić głośność systemu i użyć klawiszy w górę i w dół, aby wyregulować głośność. Dostępnych jest 15 poziomów głośności.



5. Język: jak pokazano na poniższym rysunku, możesz otworzyć menu ustawień języka, aby ustawić język systemu. Domyślnym językiem jest chiński. Angielski jest opcjonalny.




5. Pozostałe informacje, jak pokazano na poniższym rysunku, można wyświetlić numer seryjny produktu itp., przechodząc do informacji w menu Ustawienia.




## Instrukcja obsługi

### XII. Zakończenie masażu


1. Podczas masażu naciśnij dotykowy przycisk On/Off na pilocie lub naciśnij przycisk On/Off na prawym podłokietniku, aby wyłączyć urządzenie. Natychmiast wyłączone zostaną wszystkie funkcje masażu, a oparcie i podnóżek zostaną ustawione w pozycji wyjściowej. Gdy upłynie czas masażu, wszystkie funkcje masażu zostaną automatycznie wyłączone, przy czym oparcie i podnóżek nie zostaną ustawione w pozycji wyjściowej.

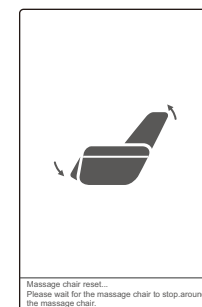


Odłącz zasilanie całego urządzenia, jak pokazano na rysunku (Schemat pozycji przełącznika zasilania urządzenia).

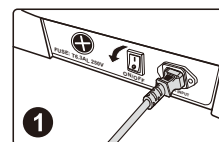

Przełącz przełącznik zasilania (pozycja "0")

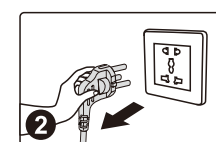

Schemat wyciągania wtyczki zasilania

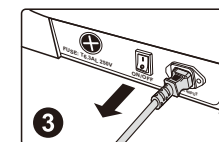


Wyjmij przewód zasilający urządzenie

## Czyszczenie i konserwacja

### Czyszczenie skóry syntetycznej i elementów plastikowych

Przetrzyj skórę miękką, suchą szmatką:

- Nie używaj do czyszczenia urządzenia środków chemicznych, takich jak rozcieńczalnik, benzyna, alkohol itp.
- Używając dostępnych w sprzedaży środków do pielęgnacji skóry, postępuj zgodnie z instrukcją obsługi.
- Jeśli skóra syntetyczna jest szczególnie brudna, wytrzyj ją w następujący sposób:
  1. Zanurz miękką szmatkę w wodzie lub ciepłej wodzie z dodatkiem 3% do 5% neutralnego detergentu, a następnie dokładnie ją odciśnij.
  2. Użyj miękkiej ściereczki do wytarcia powierzchni skóry.
  3. Wytrzyj roztwór czyszczący szmatką namoczoną w czystej wodzie i dokładnie wyciśnij ją.
  4. Przetrzyj miękką ściereczką.
  5. Pozostaw do swobodnego wyschnięcia.
- Jeśli trudno jest usunąć plamy, zanurz dostępną w sprzedaży gąbkę z melaminy w neutralnym detergencie, a następnie wytrzyj nią urządzenie.
- Nie używaj suszarki do włosów do suszenia powierzchni.
- Zachowaj ostrożność podczas korzystania z urządzeń w dżinsach i tkaninach kolorowych, ponieważ kolor tkaniny może zabarwić powierzchnię skóry syntetycznej.
- Nie utrzymuj tych części w kontakcie z tworzywem sztucznym przez dłuższy czas, ponieważ spowoduje to zabrudzenie powierzchni skóry syntetycznej.
- Syntetyczna skóra może się odbarwić, dlatego po użyciu np. farby do włosów przykryj część dotykaną przez włosy ręcznikiem.

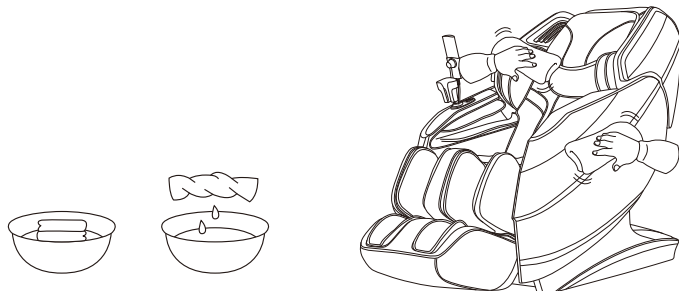

## Rozwiązywanie problemów

<b>Problem</b>	Kiedy podnózek lub oparcie osiągną określoną pozycję, naciskasz odpowiedni przycisk regulacji, ale nie następuje żadna zmiana i emitowany jest przerywany sygnał dźwiękowy.
<b>Rozwiązanie</b>	Ze względu na konstrukcję fotela i wymagania ergonomiczne, fotel ma ograniczenie ochronne dla max stanu regulacji położenia. Po osiągnięciu granicy pojawi się dźwięk przypominający.

<b>Problem</b>	Funkcja nie działa lub niektóre funkcje nie działają po włączeniu fotela.
<b>Rozwiązanie</b>	Po włączeniu fotela przez naciśnięcie przycisku włącznika należy ręcznie wybrać automatyczny program masażu lub inny tryb pracy. Jeśli fotel nie będzie działał, wyłącz się automatycznie po 20 minutach. Jeśli wybrano tryb programu manualnego, funkcje, które nie zostały wybrane, mogą zostać wyłączone, a tryb pracy należy ustawić ręcznie w trybie manualnym.

<b>Problem</b>	Podczas regulacji pozycji fotela słychać odgłos tarcia skóry.
<b>Solution</b>	W tym fotelu zastosowano wysokiej jakości skórę odporną na zużycie, która spełnia wymogi ochrony środowiska. Ze względu na właściwości materiałów skórzanych podczas tarcia przy ruchu względnym będzie występował słyszalny odgłos, co jest zjawiskiem normalnym. Uwaga: Jeśli podczas pracy fotela usłyszysz dźwięk rozrywania tkaniny lub skóry, natychmiast przestań z niego korzystać i zwróć się do profesjonalnego serwisu.

<b>Problem</b>	Ramiona masujące nie docierają do barków i karku.
<b>Solution</b>	Jeśli głowa nie dotyka poduszki za głową lub plecy nie dotykają oparcia, pozycja ramion może być niższa niż rzeczywista pozycja podczas procesu skanowania sylwetki. Usiądź w najgłębszej pozycji siedzenia, oprzyj głowę na zagłówku i zacznij skanowanie od początku.

<b>Problem</b>	Fotel jest uszkodzony. Przewód zasilający lub wtyczka są nienaturalnie gorące.
<b>Solution</b>	Aby zapobiec wypadkom, skontaktuj się z autoryzowanym centrum serwisowym.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących urządzenia, skontaktuj się z wyznaczonym serwisem.

## Specyfikacja techniczna urządzenia

---

Model: iRest GRANDEASE (A550)

Nazwa: Fotel masujący

Napięcie znamionowe: 110-120V~ 60Hz

220-240V~ 50Hz/60Hz

Moc znamionowa: 120W

Czas znamionowy: 20 minut

Klasa bezpieczeństwa: Klasa 1

Użyte materiały: PCV, PA, części stalowe oraz części elektryczne I elektroniczne

TWORZYWA	PU	SKÓRA	TKANINA	DREWNO